

Posicionador de maluc Pacer



El posicionador de maluc es balanceja amb el moviment de deambulació del pacient permetent a l'usuari canviar el pes d'una cama a l'altre.

El posicionador de maluc es ven amb un parell d'empunyadures.

Els anells a la corretja posterior del posiconador de maluc s'acoblen a les empunyadures, això permet assegurar ràpidament al pacient després d'una transferència.

Per mantenir la pelvis a la línia mitja de l'usuari, i per darrera de les espatlles pot fixar les cinxes anteriors més endarrarides en el xassis.

Pot baixar les empunyadures i allargar les cinxes per a usar el posicionador de maluc com una arnès de seguretat.

Pot aixecar les empunyadures i escurçar les cinxes per ditribuir el pes i aconseguir un marxa parcial.

Disposa d'un pad posicionador de maluc, que es posa sobre el posicionador per donar més comoditat gràcies a que és molt encoixinat.

Mesures

Dimensions sense pad:

Longitud de l'entrecama: 6 cm.

Amplada: 3 cm.

Longitud: 23 cm.

Models i talles

- SC3301003 Posicionador de maluc - Talla petita
- SC3302003 Posicionador de maluc - Talla gran
- SC3301004 Encoixinat per a posicionador de maluc - Talla Talla petita
- SC3302004 Encoixinat per a posicionador de maluc - Talla gran