
HOGGI[®]



FLUX Manual de usuario

es

Manual de usuario para FLUX

1	Identificación del modelo	
1.1	Identificación del modelo	3
1.2	Configuración básica	4
1.3	Condiciones ambientales	4
2	Información común	
2.1	Prólogo	5
2.2	Aplicación	5
2.3	Declaración de conformidad	5
2.4	Condiciones de garantía	6
2.5	Servicio y reparaciones	6
2.6	Obligación de informar de los casos graves	6
2.7	Seguridad del producto / retiradas de productos	6
3	Instrucciones de seguridad	7
3.1	Significado de los símbolos	7
3.2	Instrucciones de seguridad comunes	7
4	Entrega y preparación para su uso	11
5	Posibilidades de ajuste y adaptación	13
5.1	Barra ajustable en altura y profundidad (todas versiones)	13
5.2	Barra estándar	13
5.3	Barra con empuñadura universal	13
5.4	Antiretroceso	14
5.5	Plegado para transporte	14
6	Accesorios	15
6.1	Soportes de antebrazo con empuñadura	15
6.2	Ruedas parachoque	16
6.3	Freno de fricción	16
6.4	Freno en las empuñaduras	16
6.5	Freno de mano	17
6.6	Antivuelcos	18
6.7	Asiento	18
6.8	Control de cadera ajustable	18
6.9	Soporte de tronco	19
6.10	Control de cadera dinámico	20
6.11	Portabultos	20
6.12	Cesta	20
6.13	Bloqueo de dirección	21
7	Transporte	21
8	Almacenamiento	21
9	Reciclado y desecho	22
10	Mantenimiento / Servicio y reparaciones, y vida útil	23
11	Especificaciones	24

1. Identificación del modelo

La etiqueta de la base está montada en la parte posterior del chasis.

The diagram illustrates three identical labels for a 'HOGGI FLUX' product. Each label contains the following information:

- Model number: **330X-0000-XXX**
- Color code: **MD**
- Manufacturer: **HOGGI GmbH**, Eulerstr. 27, 56235 Ransbach-Baumbach
- Product name: **FLUX**
- Product description: **Laufleerhilfe Größe X**
- Origin: **MADE IN GERMANY**
- Barcode: **(01)04047349096062(21)202178999**
- CE mark: **CE**
- Max. load: **max. load XXXkg**
- Serial number: **SN 2021178999**
- Production date: **2021/05/12**

Callouts on the right side of the diagram identify the following fields:

- Código de color
- Número de artículo
- Talla
- Número de serie
- Etiqueta CE
- Clasificación / Nombre producto
- Fecha de fabricación
- Carga máxima
- Fabricante
- Lugar de fabricación
- Año de fabricación
- Código UDI

1.2 Configuración básica

- Chasis plegable compacto FLUX
- Ruedas delanteras giratorias sobre neumáticos de PU
- Barra ajustable en altura y profundidad
- Antirretroceso conmutable de encendido y apagado en las ruedas traseras

1.3 Condiciones ambientales

Los factores ambientales como la temperatura y la humedad pueden dañar el andador. El fabricante recomienda no exponer el Flux a temperaturas ambiente inferiores -20°C o superiores a $+40^{\circ}\text{C}$, y una humedad de 5 a 100%.

Atención: Al estar parado al sol durante un período de tiempo más largo, las partes de la ayuda para caminar pueden calentarse. ¡Preste atención y téngalo en cuenta!

2 Información común

2.1 Prefacio

Gracias por escoger el andador **FLUX**. Hemos diseñado este producto de alta calidad para hacer su vida más fácil y segura e incluimos este manual para ayudarle a usarlo y mantenerlo adecuadamente. Por favor, lea las siguientes instrucciones para asegurarse que usa el producto según las recomendaciones. Si tiene alguna duda o tiene algún problema, por favor contacte con su distribuidor.

Esperamos que **FLUX** cumpla con sus expectativas. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas con respecto al modelo especificado en este manual. Antes de usar el cochecito por primera vez, el usuario y el personal de apoyo deben leer y entender este manual para garantizar su correcto uso.

2.2 Aplicación

FLUX se diseñó originalmente como un "andador posterior" que se usa en la dirección inversa. Esto proporciona una libertad óptima para las piernas en la dirección hacia adelante. Sin embargo, la FLUX también se puede utilizar como un "andador anterior" frente al usuario.

FLUX ayuda a los niños o adolescentes a usar la fuerza y el apoyo de sus extremidades superiores para ayudar a caminar a sus extremidades inferiores. El andador se utilizará para ayudar al niño a aprender la secuencia de movimientos necesarios para caminar y así aumentar su rango de movilidad.

Está indicado para el entrenamiento de la marcha en caso de enfermedades o lesiones que supongan tanto una alteración del aparato locomotor como un desequilibrio/asinerxia.

El diseño promueve una postura erguida al pararse o caminar y, por lo tanto, difiere de los andadores básicos en que requiere que el usuario emplee movimientos más naturales. Puede simplificar en gran medida la capacidad del usuario para pararse, establecer un sentido de equilibrio y caminar.

FLUX es adecuado para su reutilización. Antes de volverlo a usar, un distribuidor especializado debe revisar todas las medidas de inspección, cuidado y mantenimiento enumeradas en el capítulo 10 "Mantenimiento y cuidado".

2.3 Declaración de conformidad

HOGGI GmbH, como fabricante bajo su exclusiva responsabilidad, declara que el andador FLUX cumple con los requisitos básicos de seguridad y rendimiento según el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento y el Consejo de la UE. Se han aplicado las normas armonizadas aplicables. El andador FLUX cumple los requisitos de las normas ISO 7176-8, DIN EN ISO 11199-2, DIN EN ISO 11199-3 y DIN EN 12182.

2.4 Condiciones de garantía

La garantía se aplica solo cuando el producto se utiliza de acuerdo con las condiciones especificadas y para los fines previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. El fabricante no es responsable de los daños causados por componentes y piezas de repuesto no aprobados por el fabricante. Véase también el de los términos y condiciones en www.hoggi.de

2.5 Servicio y reparaciones

El mantenimiento y las reparaciones del andador FLUX solo deben ser realizados por distribuidores autorizados de HOGGI. Si surge algún problema, póngase en contacto con el distribuidor que le suministró su FLUX. Los distribuidores autorizados solo montan repuestos originales HOGGI. Las piezas de repuesto y las unidades de reemplazo están disponibles durante toda la vida útil del producto, pero solo durante un máximo de 2 años después de la venta del último producto de esta serie. La ayuda para caminar se hace por encargo para el primer usuario. Por esta razón, no hay disponible un sustituto para caminar en la configuración inicial. Para garantizar una entrega correcta de repuestos, se requiere el número de serie de su andador. Estamos encantados de ayudarle a encontrar un distribuidor en su área. Puede ponerse en contacto con nosotros en: info@hoggi.de

2.6 Obligación de informar de los casos graves

Todos los incidentes graves que se produzcan en relación con el producto deben comunicarse al fabricante, a los distribuidores especializados y a la autoridad competente.

2.7 Seguridad del producto / Retirada del producto

Para obtener nuevos consejos sobre seguridad o retirada de productos, puede obtener información de distribuidores especializados o directamente del fabricante en www.hoggi.de.



Para la reparación y el servicio, se requieren las siguientes herramientas:
Llaves Allen, tamaños: 4 mm, 5 mm y 6 mm
Llaves, tamaños: 8 mm, 10 mm y 19 mm
Destornillador, tamaño: 2



Documentación adicional de FLUX:

- Manual de servicio
- Catálogo de repuestos

3 Instrucciones de seguridad

3.1 Significado de los símbolos



¡Precaución!
Advertencia de posible peligro de accidente y Herida. Advertencia de posible daño técnico.



¡Información!
Acerca de uso de producto.



¡Información!
Para personal de servicio.



¡Precaución!
Producto de terapia solo para uso en interiores.



¡Precaución!
El dispositivo terapéutico solo se puede utilizar bajo supervisión.



¡Atención!
Leer manual antes ¡uso!

3.2 Instrucciones de seguridad comunes



¡Lea el manual antes de usar el dispositivo!

Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso y practique las diversas funciones. Usted es responsable de la seguridad de su hijo. La seguridad de su hijo podría verse afectada si no sigue las instrucciones de este manual. Sin embargo, no todas las circunstancias y situaciones posibles pueden ser cubiertas por este manual. El sentido común, el cuidado y la circunspección no son características del producto, sino que se requieren de las personas que usan el producto. La persona que está usando el producto y sus accesorios debe entender todas las instrucciones y debe explicarlas a cada persona que usa el producto y sus accesorios.

Si las instrucciones no son claras y se hacen necesarias más explicaciones, o si tiene más preguntas, comuníquese con su distribuidor de **HOGGI**.



¡Atención!
El producto solo se puede utilizar en terreno firme y nivelado.



¡Atención!

¡FLUX es un aparato terapéutico y solo puede usarse en interiores y bajo supervisión! FLUX se puede usar en exteriores siempre que se haya instalado el freno opcional con bloqueo de rueda.



¡Precaución!

Al plegar el andador, no sujete otras partes que no sean las descritas, especialmente el mecanismo de plegado, ya que de lo contrario existe el riesgo de aplastamiento.



¡Precaución!

Todas las palancas de ajuste se ajustan con los dedos sin utilizar herramientas.



¡Precaución!

¡Observe la carga máxima para cada modelo (consulte 11 Datos técnicos)!



¡Precaución!

La capacidad de carga máxima de la cesta portaobjetos y del portaequipajes es de 5 kg.



¡Precaución!

Colocar bolsas pesadas u otro peso puede afectar negativamente la estabilidad.



¡Precaución!

El tope de extracción determina la altura máxima posible de la barra de agarre; no se pueden hacer ajustes más allá de esta área.



¡Precaución!

Verifique que la sujeción sea suficiente cargando el asidero de acuerdo con la capacidad de carga máxima (ver 11 datos técnicos).



¡Precaución!

La profundidad de la barra de agarre debe comprobarse y, en su caso, corregirse después de ajustar altura; sino, existe riesgo de que vuelque hacia delante.



¡Precaución!

No está permitido ajustar el soporte del antebrazo con asas hacia el exterior más allá de la barra de agarre, ya que existe el riesgo de que vuelque.



¡Precaución!

Asegúrese de que su hijo no se incline demasiado hacia afuera del andador para alcanzar los objetos que se encuentran al frente, al costado o en la parte trasera del FLUX. Un cambio en el centro de gravedad puede hacer que el FLUX se vuelque.



¡Precaución!

La barra de agarre no se puede utilizar como superficie de asiento, ya que de lo contrario existe el riesgo de que vuelque.



¡Precaución!

Las piezas del chasis y el portaequipajes no se pueden utilizar como superficie de asiento o para estar de pie, ya que existe el riesgo de que vuelque..



Tenga cuidado en caso de temperaturas extremas. Flux puede calentarse significativamente cuando está al sol o en la sauna. En condiciones de frío extremo, existe el riesgo de hipotermia. Para personas con piel insensible (es decir, personas que no pueden percibir un aumento de temperatura) y/o con daño en la piel, se debe tener cuidado de que las partes metálicas no alcancen una temperatura demasiado alta. En estos casos, es imprescindible llevar prendas adecuadas para proteger la piel.



¡Precaución!

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Los envases de plástico presentan peligro de asfixia.



Eliminación de residuos: el material de embalaje, en lo que respecta a piezas de metal, aluminio y plástico, puede reciclarse. El reciclaje debe operarse de acuerdo con los términos nacionales y legales. Por favor, pregunte a la administración municipal por las empresas locales de eliminación de residuos.



¡Información!

Limpie todos los componentes del chasis y las piezas de plástico utilizando solo productos de limpieza domésticos estándar.



¡Información!

Observe el ancho máximo de FLUX (espacio libre de la puerta). Ver también datos técnico 11 y placa de características adherida al producto.



¡Información!

Si algún defecto se vuelve evidente, comuníquese con su distribuidor HOGGI autorizado para eliminarlo. También recomendamos que su distribuidor autorizado realice el mantenimiento de su FLUX cada doce meses.



Las personas con discapacidad visual o con deficiencias cognitivas deben hacer que los asistentes lean en voz alta el material informativo y las instrucciones de funcionamiento, o pueden hacer uso de ayudas de lectura electrónicas. Todos los documentos están disponibles como archivos PDF en el Centro de descargas en www.hoggi.de. ¡Además, están disponibles en línea videos de productos y galerías de fotos de productos!



¡Información!

Cada vez que cambie cualquier configuración en el FLUX, asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.



Puede encontrar información sobre la seguridad del producto o retiros del producto y todos los detalles de contacto en nuestro sitio web en www.hoggi.de



4 Entrega y preparación para su uso

El paquete original contiene los siguientes componentes:

- chasis base plegado;
- barra plegada;
- instrucciones de uso y lista de herramientas necesarias;
- accesorios según pedido.

Retire con cuidado los elementos de seguridad del transporte y el material de embalaje.



Proceda de la siguiente manera para montar el FLUX:

FLUX tallas 1-3

- Tome el chasis base detrás de las ruedas delanteras y despliegue el chasis básico como se muestra.



- Empuje la palanca de plegado hasta que los pasadores de bloqueo encajen.



FLUX talla 4

- Sujete el chasis base detrás de las ruedas delanteras y despliegue el chasis básico como se muestra.



- Empuje hacia abajo los controles deslizantes hasta que los ganchos de seguridad rojos se bloqueen con un clic audible.



- Despliegue el pasamanos como se muestra.



- Abra la palanca excéntrica y coloque la barra de agarre en el chasis base desplegado.



- Presione los botones a presión (tope de extracción) hacia adentro cuando coloque el pasamanos en el chasis. Inserte la barra de apoyo en el chasis lo más posible, hasta que los topes extraíbles encajen en el lado izquierdo y derecho.



¡Precaución!
El tope de extracción determina la altura máxima posible de la barra; no se puede hacer ningún ajuste más allá de esta área.



- Deslice la barra de agarre a la altura deseada y cierre la palanca excéntrica en ambos lados del chasis básico.



¡Precaución!
Compruebe que la sujeción sea suficiente cargando la barra de agarre de acuerdo con la capacidad de carga máxima (ver datos técnicos 11)



- Cuando la palanca está abierta, puede establecer la fuerza de cierre de la palanca excéntrica ajustando las tuercas moleteadas.
- Finalmente, puede ajustar la profundidad del pasamanos de manera uniforme en ambos lados y apretar el tornillo de cabeza hueca hexagonal en ambos lados.



Asegúrese de apretar los tornillos que haya aflojado anteriormente.



FLUX tallas 1-3: la profundidad de la barra debe ajustarse de modo que el borde anterior de la empuñadura o las almohadillas de soporte del antebrazo en la barra queden detrás de las horquillas giratorias por lo menos la longitud de A. Si se usan ruedas protectoras, la medida de A debe aumentarse en un centímetro. Lo mejor es comprobar esto colocando las horquillas de las ruedas del FLUX contra una puerta lisa y midiendo el espacio desde la hoja de la puerta hasta la empuñadura, es decir, la almohadilla del antebrazo.

FLUX talla 4: no se necesita ajuste.



Longitud mínima de A cuando se utiliza:	FLUX talla 1	FLUX talla 2	FLUX talla 3
Barra estándar	14 cm	17 cm	20 cm
Barra con empuñadura universal	12 cm	17 cm	20 cm
Barra con soporte brazo inferior	14 cm	15 cm	20 cm



¡Precaución!

La profundidad de la barra de agarre debe comprobarse y, en su caso, corregirse después de cada ajuste de altura; de lo contrario, existe el riesgo de que vuelque hacia delante.



5 Posibilidades de ajuste y adaptación

5.1 Regulación de la altura y la profundidad de la barra (todas las versiones)

La altura y la profundidad de la barra de agarre se pueden ajustar para satisfacer las necesidades individuales.

(Consulte **4 Entrega y preparación para el uso**).




5.2 Barra estándar

La barra estándar se muestra aquí.



5.3 Barra con empuñadura universal

Al aflojar las conexiones de los tornillos, puede girar ambas empuñaduras, ajustando así la distancia entre las empuñaduras y su altura (ver **datos técnicos 11**).

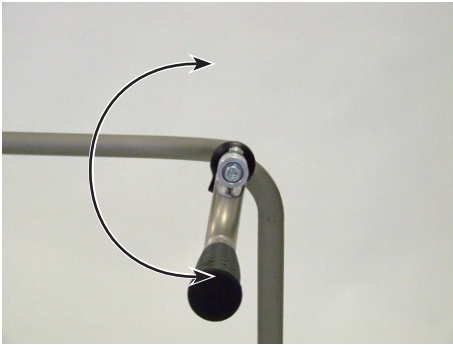

Solo puede ajustar las empuñaduras dentro del área que se muestra aquí.

Después del ajuste, vuelva a apretar las uniones roscadas.



Asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.

5.4 Antiretroceso

Dado que los niños instintivamente quieren caer hacia atrás todo el tiempo, las tallas 1 y 2 de FLUX están equipadas con antiretrocesos y, por lo tanto, proporciona un soporte óptimo. La ilustración muestra el antiretroceso liberado.



¡Precaución!
Verifique regularmente que funcione correctamente y corrija si es necesario. Los neumáticos desgastados o dañados deben ser reemplazados.

Después de tirar del mecanismo de acción rápida, el antiretroceso se puede girar hacia adelante hasta que el pestillo encaje en la posición desactivada.

Esto hace posible mover libremente el andador hacia adelante y hacia atrás.

Para activar el bloqueo del antiretroceso, simplemente tire del pasador. El bloqueo antiretroceso girará sobre la rueda.



5.5 Plegado para el transporte

Flux tallas 1 - 3

Tire de los pasadores de bloqueo antes de plegar y empuje las palancas de plegado hacia arriba en ambos lados.

Tome el chasis de la base del andador detrás de la rueda delantera y levántelo o incline el andador sobre las ruedas traseras.

El chasis anterior se plegará.

Conseguirá un tamaño de plegado especialmente pequeño si desmonta y pliega la barra.

Proceda en el orden inverso como se describe en “4 Entrega y preparación para el uso”.



¡Precaución!
¡Durante el plegado del andador, no sujete otras partes que no sean las descritas, especialmente el mecanismo de plegado porque de lo contrario existe el riesgo de aplastamiento!



FLUX talla 4

Presione la parte superior de los ganchos de seguridad rojos en ambos lados del chasis antes de desplegarlo. Empuje los controles deslizantes hacia arriba hasta que se desbloqueen.

Tome la barra del andador como se muestra y levántelo o incline el andador sobre las ruedas traseras. El chasis anterior se plegará.



Conseguirá un tamaño de plegado especialmente pequeño si desmonta y pliega la barra.

Proceda en el orden inverso como se describe en el apartado “4 Entrega y preparación para el uso”



¡Precaución!

¡Durante el plegado del andador, no sujete otras partes que no sean las descritas, especialmente el mecanismo de plegado, ya que de lo contrario existe el riesgo de aplastamiento!



6 Accesorios

Todos los accesorios que no sean instalados por el fabricante deben ser instalados por técnicos capacitados. Las siguientes notas sobre la instalación son para su información, pero deben ser realizadas por técnicos capacitados.




6.1 Soportes de antebrazo con empuñadura (versión ajustable de 2 o 3 ejes)

Los soportes de antebrazo con empuñaduras verticales se han diseñado para usuarios que no pueden apoyarse en los brazos extendidos y que se sienten más seguros utilizando los antebrazos como apoyo. La versión de 3 ejes es ajustable en un eje vertical adicional.

La altura de las almohadillas para los antebrazos y las empuñaduras verticales se pueden ajustar junto con la barra.



Asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.

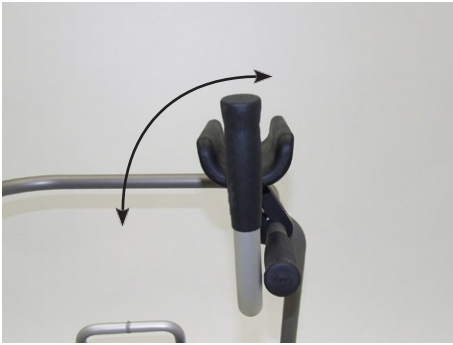

Solo puede ajustar las empuñaduras/almoHADILLAS del antebrazo dentro del área que se muestra aquí.



¡Precaución!

No está permitido ajustar el soporte de antebrazo con empuñadura hacia el exterior y más allá de la barra de agarre, ya que existe riesgo de vuelco.




6.2 Ruedas parachoques

Las ruedas parachoques protegen los muebles y las puertas y minimizan el riesgo de que el andador quede atrapado en obstáculos.



6.3 Freno de fricción

Los frenos de fricción se pueden utilizar para desacelerar.

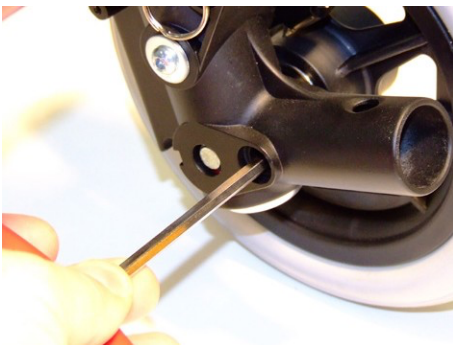

La presión de los frenos de fricción y, por lo tanto, la velocidad de rodadura de los neumáticos se puede variar aflojando o apretando los tornillos de fijación interiores.



6.4 Freno en las empuñaduras

El bloqueo de las ruedas permite al paciente controlar el frenado y estacionar el FLUX de forma segura.

Para bloquear los frenos, tire completamente de la manija del freno y enganche la palanca de retención con el dedo índice. Para desactivar el bloqueo de la rueda, tire ligeramente de la manija del freno para que la palanca de retención se abra.



FLUX tallas 1 - 3


Si la función de frenado es insuficiente, reajuste el cable de freno respectivo con el tornillo de ajuste.



FLUX talla 4

A la salida de cada carcasa de freno, un tornillo de fijación acodado aleja el cable del freno del neumático de la rueda trasera. Después de aflojar la contratuerca, se puede ajustar la pretensión del freno individual (izquierdo o derecho).


Vuelva a apretar la contratuerca con firmeza y asegúrese de que la manivela del tornillo de fijación se vea hacia el bastidor trasero, lejos del neumático.

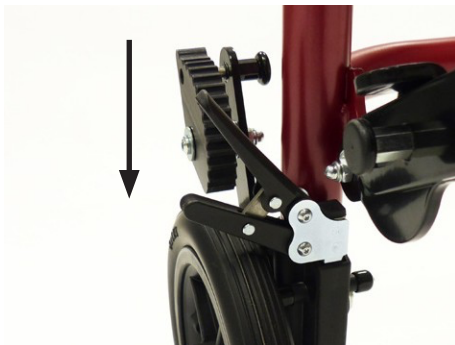

6.5 Feno de estacionamiento FLUX tallas 1 - 3

El freno de estacionamiento permite aparcar de forma segura el andador FLUX sin que se deslice.

La ilustración muestra el freno en estado abierto.

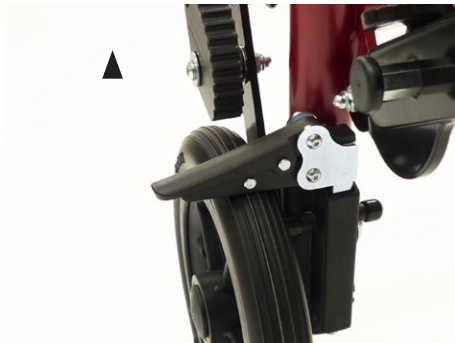

Para el bloqueo, el soporte de sujeción superior se baja sobre la rueda presionado hasta que el freno encaje de forma segura.

La presión del freno se puede aumentar apretando el tornillo de fijación.

Para abrir y desactivarlo, tire de nuevo hacia arriba del lado de la solapa.



FLUX talla 4

La ilustración muestra el freno activado.



6.6 Antivuelcos

Los antivuelcos dan estabilidad para que el andador no vuelque hacia atrás. Los dispositivos antivuelco se insertan en el soporte y se aseguran con el botón a presión para que no giren. Los dispositivos antivuelco se pueden girar hacia arriba.



¡Precaución!
Asegúrese de que los botones estén bien acoplados. Compruébelo con un tirón fuerte para asegurarse que están bien acoplados.



6.7 Asiento

El asiento no está diseñado para ser un mueble cómodo sino como un asiento auxiliar sencillo y practicable que permite al usuario descansar cada cierto tiempo mientras utiliza el FLUX.

El asiento se puede ajustar a los diferentes tamaños de chasis colocando los brazos del tubo respectivamente.



El asiento se sujeta a la parte superior del chasis delantero mediante un conjunto de soportes de sujeción.



Asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.



El asiento está ubicado en posición vertical al caminar y se puede plegar para usarlo simplemente.



6.8 Control de cadera ajustable

Las almohadillas para la cadera y las nalgas permiten que el usuario se coloque perfectamente en el área de la barra de empuje.

Muchos usuarios tienden a querer apoyarse en la parte trasera. Estas almohadillas llevan al usuario una vez más al área anterior de la barra de agarre y por lo tanto a una posición erguida. El ancho y el ángulo de los soportes pélvicos también se pueden ajustar. El soporte central se puede quitar si se desean configuraciones especialmente estrechas.



Al combinar dos juegos de soportes de sujeción, las almohadillas para la parte inferior de la cadera se pueden ajustar en varias posiciones y ángulos.



Asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.



6.9 Soporte de tronco

El soporte del tronco sirve para guiar y estabilizar la parte superior del cuerpo. Proporciona soporte lateral y, por lo tanto, es ideal para usuarios con estabilidad de torso insuficiente. Está asegurado por el mecanismo de bloqueo con hebilla de cinturón. ¡El sistema solo pretende ser una guía y no funciona como soporte!

El soporte del tronco se entrega premontado.



Al combinar dos abrazaderas, el soporte del tronco se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás en ángulo.

Para ajustar, afloje la conexión del tornillo como se muestra y mueva la guía a la posición deseada. Luego, los tornillos deben apretarse nuevamente.

La figura muestra la abrazadera inferior.



La figura muestra la abrazadera superior.



Las almohadillas individuales del soporte del tronco se pueden ajustar en anchura y ángulo.

Afloje la unión roscada del soporte de la almohadilla a la derecha y/o a la izquierda y mueva las abrazaderas de tubería a la posición deseada. Luego, los tornillos deben apretarse nuevamente.

La figura muestra la estrecha posición de liderazgo.



La figura muestra la amplia posición de liderazgo.



6.10 Control de cadera dinámico

El control de cadera dinámico ayuda a caminar libremente fijando al usuario con el cinturón de cadera.

También es posible utilizar una fijación hecha a medida (corsé o cinturón) suministrada por una ortopedia.



6.11 Portabultos

El portabultos se sujeta a la parte superior del chasis delantero de la misma manera que el asiento y se puede usar junto con el asiento montado. Para lograr un paquete plegable compacto, el portabultos se puede plegar.



¡Precaución!
El portabultos debe utilizarse con antivuelcos.



Portabultos talla 1 para Flux talla 1 y 2.
Portabultos talla 3 para Flux talla 3 y 4.

El portabultos se entregará con una correa tensora para fijar mochilas escolares y similares.



¡Precaución!
La capacidad máxima de carga de la cesta y el portabultos es de 5 kg.



6.12 Cesta

Además del uso práctico, la cesta de almacenamiento se puede utilizar con fines terapéuticos, por ejemplo, para proporcionar un estímulo para que el paciente colecciona cosas.

La cesta está unida al portabultos mediante cuatro correas de velcro.



La posición de las correas de velcro difiere según el tamaño del portabultos.

Cesta sobre portabultos talla 1

- Fila superior aprox. 4 cm desde el borde superior
- Fila inferior aprox. 17 cm desde el borde superior
- Distancia horizontal aprox. 17 cm



Cesta sobre portabultos talla 3

- Fila superior aprox. 5 cm desde el borde superior
- Fila inferior aprox. 17 cm desde el borde superior
- Distancia horizontal aprox. 20-21cm



¡Precaución!

La capacidad máxima de carga del portabultos y la cesta es de 5 kg.

6.13 Bloqueo de dirección



El bloqueo de dirección es especialmente adecuado para la fase inicial de la terapia con los modelos FLUX, ya que una mayor maniobrabilidad también requiere una mayor capacidad de coordinación por parte del usuario.

El bloqueo de dirección de la rueda se puede utilizar para convertir un extremo delantero giratorio en un extremo delantero rígido.

Para bloquearlo, gire el pasador de bloqueo 90° y déjelo encajar en el orificio designado en la horquilla de la rueda. Para desactivarlo, tire del pasador de bloqueo, gírelo 90° para que permanezca en la posición desacoplada.

Después de aflojar el tornillo de sujeción, el seguimiento se puede ajustar con el bloqueo giratorio activado.

7 Transporte



FLUX se puede transportar en una sola pieza según el tamaño y el equipo.

8 Almacenamiento



Puede lograr el tamaño de embalaje más pequeño plegando el chasis y quitando la barra de agarre.

9 Reciclaje y eliminación

FLUX está hecho de materiales reciclables. El embalaje del producto, así como todas las piezas de metal, aluminio y plástico, pueden reutilizarse.

La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las respectivas normas legales nacionales. Por favor, pregunte a la administración de la ciudad/municipio por las empresas locales de eliminación de residuos.

10 Mantenimiento / Servicio y Reparaciones y vida útil

Su andador FLUX está aprobado por la CE. Por la presente, el fabricante garantiza que este producto médico en su conjunto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento y el Consejo de la UE.

Antes de cada uso, FLUX debe verificarse para ver si funciona correctamente. Los elementos enumerados en la siguiente tabla deben ser verificados por el usuario en los intervalos indicados. El incumplimiento de estas sencillas comprobaciones puede dar lugar a problemas que podrían invalidar la garantía.

Revisión	diario	semanal	mensual
Función de freno y anti retroceso	X		
Revisión de los tornillos		X	
Inspección visual de ruedas y rodamientos			X
Contaminación de rodamientos			X

Si algún defecto se vuelve evidente, comuníquese con su distribuidor HOGGI autorizado para eliminarlo. También le recomendamos que haga revisar su andador FLUX por su distribuidor autorizado cada doce meses.



Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Limpie todos los componentes del chasis y las piezas de plástico utilizando únicamente detergentes suaves.
- En la mayoría de los casos, basta con pasar un paño húmedo.
- No utilice su andador FLUX en agua salada.
- Evitar que la arena u otras partículas dañen los rodamientos de las ruedas.
- Las partículas de cabello y suciedad generalmente se acumulan entre la rueda giratoria y la horquilla. Esto puede impedir que las ruedas giratorias giren suavemente. Retire la rueda y limpie a fondo la horquilla y la rueda con un detergente suave.
- Especialmente al principio o después de ajustar el andador, se debe comprobar la solidez de las uniones roscadas. Si una conexión roscada se afloja repetidamente, póngase en contacto con el distribuidor especializado responsable.

Vida útil FLUX:

La vida útil esperada del FLUX es de 6 años, dependiendo de la intensidad de uso y mantenimiento. Recomendamos una inspección anual por parte de un distribuidor HOGGI autorizado. En caso de interferencia o daño de la ayuda para caminar, debe ser revisado inmediatamente por un distribuidor o una tienda de suministros médicos.

11 Datos técnicos

Medidas (cm) y peso (kg)		FLUX talla 1	FLUX talla 2	FLUX talla 3	FLUX talla 4
Barra agarre estándar	Altura agarre	48-61	57-81	69-87	82-102
	Ancho agarre	41	46	51	51
Barra agarre empuñaduras universales					
	Altura agarre	43-68	51-88	62-94	75-102
	Ancho agarre	29-41	34-46	39-51	39-51
	Diámetro agarre	3	3	3	3
Soportes antebrazos con empuñaduras					
	Altura desde el suelo	52-69	61-89	73-95	86-110
	Distancia (antebrazos)	29-41	34-46	39-51	39-51
Chasis	Largo total*	65	81	88	91
	Ancho total**	64	69	74	78
	Carga máxima	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
	Diámetro rueda delantera/trasera	15 / 20	15 / 20	15 / 20	20 / 30
	Altura asiento	37	44	54	58
	Peso	6,5 kg	6,8 kg	7,1 kg	9 kg
	Radio de giro (sin accesorios)	92 cm	106 cm	120 cm	175 cm

* longitud total con antivuelco +10 cm, con ruedas parachoques +1 cm

** ancho total con ruedas parachoques +2 cm



¡Atención!
Los accesorios y complementos reducen la capacidad de carga restante de FLUX.

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 - 56235 Ransbach-Baumbach - Deutschland
www.hoggi.de