

patron®

MANUAL DE USUARIO JACKO & JACKO XCOUNTRY



(Información de uso)

Manufacturing and Distribution:

PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
Info.cz@patro.eu [http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

DATOS BÁSICOS


COMPONENTES

1. Empuñadura
2. Bisagra de ajuste de altura de la empuñadura
3. Manija de liberación plegable
4. Respaldo
5. Soporte de capota
6. Soportes de barra de seguridad
7. Reposapiés
8. Rueda giratoria delantera
9. Rueda trasera
10. Freno de estacionamiento
11. Pernos hexagonales de ajuste del ángulo de la plataforma
12. Bloqueo de velcro del reposapiés
13. Reposapiés
14. Seguro de transporte
15. Ajuste de la palanca del respaldo

JACKO



Obr.2

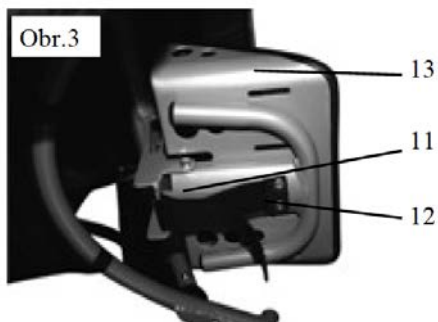


Obr.3

JACKO XCOUNTRY



Obr.2

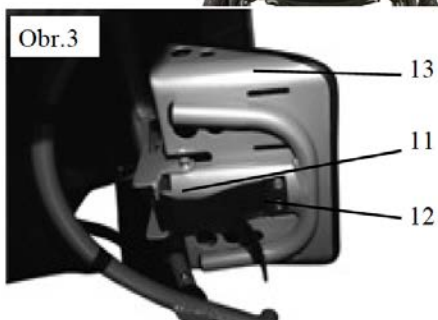

Obr.3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Jacko

Medidas en cm y peso en kg

	STD	MAXI
Profundidad del asiento	29-34	30-35
Ancho del asiento	24-34	28-38
Altura del respaldo	62	75
Altura del asiento al reposapiés	23-36	23-39
Ancho total	59	63
Longitud total	77	77
Altura total	107	115
Reg. ángulo respaldo	90º-160º	90º-160º
Ángulo de asiento	15º	15º
Freno	De pie	De pie
Longitud del cochecito plegado	88	94
Ancho del cochecito plegado	59	63
Altura del cochecito plegado	36	36
Carga máxima	40	50
Peso	18	19,5

Jacko Xcountry

Medidas en cm y peso en kg

	STD	MAXI
Profundidad del asiento	29-34	30-35
Ancho del asiento	24-34	28-38
Altura del respaldo	62	75
Altura del asiento al reposapiés	23-36	23-39
Ancho total	59	63
Longitud total	84	84
Altura total	107	115
Reg. ángulo respaldo	90º-160º	90º-160º
Ángulo de asiento	15º	15º
Freno	De pie	De pie
Longitud del cochecito plegado	88	94
Ancho del cochecito plegado	59	63
Altura del cochecito plegado	44	44
Carga máxima	40	50
Peso	10	2'05

PRESENTACIÓN

Estimado cliente,

Lea atentamente este documento antes de utilizar este producto por primera vez. Siga todas las instrucciones de seguridad indicadas en este documento. Si tiene alguna pregunta sobre el producto y su uso adecuado, póngase en contacto con personal profesional o un centro de servicio. Informe inmediatamente sobre cualquier evento adverso grave relacionado con el producto, o cualquier deterioro en la salud del usuario en relación con el uso del producto, al distribuidor oficial del producto en su país o al fabricante del producto. Para obtener la información más reciente sobre seguridad y/o retirada de este producto, así como la declaración de conformidad del producto, comuníquese con el distribuidor oficial del producto en su país o con el fabricante del producto. Guarde este documento en un lugar seguro para futuras referencias.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier peso que se añada a la empuñadura (bolsa,...) afecta a la estabilidad del cochecito!

¡Las protecciones acolchadas laterales deben ser utilizadas correctamente todo el tiempo!

Presión de aire de los neumáticos recomendado 180 kPa

¡El cierre de Velcro para el reposapiés debe sujetarse correctamente durante el uso del cochecito!

¡ATENCIÓN! No introducir los dedos en las partes móviles durante la manipulación del cochecito.

¡ATENCIÓN! ¡No deje nunca al niño sin supervisión! Incluso si los cinturones y frenos están en uso.

¡ATENCIÓN! Comprobar antes de su uso que todos los sistemas de cierre están correctamente cerrados y

todos los sistemas de seguridad son correctamente utilizados.

¡ATENCIÓN! Comprobar antes de su uso que el asiento está correctamente acoplado al chasis.

¡ATENCIÓN! El asiento no es recomendable para niños menores de 6 meses.

¡ATENCIÓN! Este producto no debe utilizarse mientras corre o practica patinaje en línea.

¡ATENCIÓN! Lea atentamente este manual antes del primer uso del cochecito, y guárdelo para posteriores

consultas. La seguridad del niño puede estar en peligro en caso de no se seguir las instrucciones y

advertencias de seguridad mencionadas en el manual de instrucciones.

PRODUCTO - DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS, IDENTIFICACIÓN:

Ha recibido un producto que está determinado para un uso cotidiano versátil en exteriores, así como en

interiores en el hogar. Antes de usar el producto por primera vez, infórmese bien de cómo usarlo, cómo

manejarlo, cómo funciona, todas las características del producto, para evitar cualquier posibilidad de

lesión. En particular, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Todos los usuarios y/o sus acompañantes deben ser capacitados por personal calificado sobre cómo operar con el producto. Los usuarios y/o sus acompañantes están obligados a leer y conocer, en particular, los riesgos residuales de este producto, en relación con las instrucciones de seguridad dadas en este documento.
- El producto ha sido adaptado a las necesidades individuales del usuario. Los cambios adicionales solo pueden ser realizados por personal calificado.
- Le recomendamos que compruebe la personalización del producto una vez al año para garantizar una configuración óptima del producto para los usuarios. Especialmente para usuarios con anatomía cambiante (p. ej., peso y dimensiones corporales), se recomienda ajustar al menos una vez cada seis meses.
- Su producto específico puede diferir de las variantes que se muestran aquí. En particular, no todos los accesorios opcionales descritos en este documento están montados en su producto.
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en el diseño descrito en este manual.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto está clasificado como un dispositivo terapéutico no invasivo de clase 1. El producto está diseñado para uso a corto y largo plazo. El producto está controlado por un acompañante y se utiliza para transportar niños con la ayuda de otra persona. El producto está diseñado para usarse sobre una superficie sólida en interiores y exteriores.

El producto es utilizado por niños con limitación temporal o permanente de la capacidad para caminar, incapaces de caminar o mantenerse de pie. El producto es adecuado para usuarios cuya anatomía (p. ej., dimensiones corporales y peso) permita el uso de este producto para el propósito dado y cuya piel esté intacta. El producto solo debe utilizarse junto con los accesorios especificados en el formulario de pedido.

El fabricante de este producto no asume ninguna responsabilidad por las combinaciones con dispositivos médicos y/o accesorios de otros fabricantes. Solo se permiten combinaciones de productos evaluadas en términos de su eficacia y seguridad. Esta combinación de producto y accesorio debe estar permitida y estipulada en el acuerdo de combinación de productos.


Indicaciones: restricción leve a severa o completa del movimiento del usuario.

Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas: falta de condiciones previas físicas o mentales, daño superficial significativo del tejido superficial (por ejemplo, piel, etc.).

Para los acompañantes: Excepcionalmente, los siguientes fenómenos pueden ocurrir a los acompañantes durante el uso del producto: dolor en los músculos del cuello, dolor en los músculos y articulaciones, trastornos circulatorios, riesgo de úlceras por presión. En caso de estos fenómenos o problemas en los acompañantes, póngase en contacto con su médico o terapeuta.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Información en la etiqueta del producto:

GTIN	Número de identificación comercial global. Según el estándar GS1 = UDI-DI – Identificador único de dispositivo - Identificador de dispositivo.
SN	Número de serie. De acuerdo con el estándar GS1 = UDI-PI - Identificador único de dispositivo - Identificador de producción.
REF	Identificación del productor – versión del producto
Mod.:	Versión del producto / texto
Spec.:	Versión de producto / versión de color
	Productor - dirección

Fecha de producción: el número de serie (primeros 3 dígitos) incluye la fecha de producción (“253” = 253.- meses desde el 01.01.2000 = enero 2021)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

- El asistente debe estar familiarizado con las instrucciones de este manual.
- Antes de su uso, se debe buscar consejo médico profesional sobre la idoneidad de este producto.
- Asegúrese siempre, antes de la salida, de que el niño esté cómodo y de que la ropa, alfombras, etc., estén metidos por dentro, para que no se caigan en las ruedas.
- Asegúrese de que el niño esté alejado de las piezas móviles antes de realizar ajustes, para evitar lesiones.
- Al inclinar y ajustar el asiento y el respaldo, actúe en consecuencia para evitar movimientos repentinos e incontrolados.
- El cochecito de paseo NO DEBE utilizarse como asiento para un niño mientras viaja en un vehículo de motor o en un autobús si el vehículo no está equipado para ello y si el cochecito no es un modelo de prueba de choque de acuerdo con los requisitos de ISO 7176-19 o adicionalmente de ANSI /RESNA WC-4:2012 Sección 19 Anexo A.
- No permita que el niño suba y baje sin ayuda del cochecito.
- Aplique siempre los frenos de estacionamiento al entrar y salir del cochecito.
- El cochecito no está diseñado para ser conducido por las escaleras.
- Asegúrese de que los accesorios de fijación, la barra de seguridad y otros equipos estén instalados y ajustados correctamente.
- No se suba al reposapiés.
- Los frenos deben estar activados en todo momento cuando el cochecito no se esté moviendo.
- Primero practique subir y bajar un bordillo con el cochecito vacío.
- El asistente debe tomar precauciones contra el riesgo de incendio. En los edificios, verifique la ubicación de las salidas de emergencia y asegúrese de que se comprendan los procedimientos.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del cochecito.
- Durante la conducción, mantenga la máxima atención para evitar situaciones de peligro o colisiones.

- No sobrecargue el cochecito. La sobrecarga de un chasis, asiento, bolso o cesta provoca la reducción de la estabilidad del cochecito.
- Conduzca el cochecito con atención para no lastimar al niño o a usted mismo.
- Si es posible, utilice siempre rampas de acceso o ascensores para superar las restricciones de acceso.
- Siempre levante el cochecito entre dos personas.
- Nunca transporte el cochecito cuando usted y/o su asistente no estén seguros de poder transportar el cochecito con el niño de manera segura.
- Cuando conduzca el cochecito por la carretera, siga las normas de circulación.
- No utilice el cochecito para ningún otro propósito para el que está diseñado.
- El cochecito está diseñado para llevar un solo niño.
- No utilice ningún otro accesorio que no sea el original PATRON diseñado para este producto.
- Cuando se pliega y despliega el cochecito, se debe seguir cuidadosamente la guía del usuario para evitar cualquier daño en la construcción que pueda afectar la estabilidad del producto.
- En caso de defecto aparente, que limite el uso seguro del producto (p. ej., daños en el chasis, caída de piezas u otros defectos visualmente visibles, grietas, etc.), es necesario dejar de usar el producto inmediatamente y ponerse en contacto con su distribuidor oficial local o centro de servicio.
- La empresa PATRON no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de accesorios distintos a los originales PATRON suministrados por esta empresa.
- La empresa PATRON no asume ninguna responsabilidad por los daños y accidentes causados por el uso inadecuado de este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1) Chasis:

Montaje del cochecito (con asiento adjunto):

Coloque el cochecito plegado sobre ruedas. Desabroche y suelte el seguro de transporte del chasis (17). Para abrir el chasis, manténgase entre las ruedas traseras y sostenga la empuñadura firmemente. Mueva la empuñadura hacia arriba y hacia atrás hasta que el mecanismo de liberación de la empuñadura esté completamente bloqueado en su posición final (3). Para verificar la posición de bloqueo, mueva hacia arriba la empuñadura para asegurarse de que ambos mecanismos estén completamente bloqueados (el chasis no debe comenzar a plegarse). Tire de las cubiertas acolchadas del chasis hacia abajo sobre el mecanismo de bloqueo y cierre ambas cubiertas con las cremalleras correctamente. Suelte la palanca de ajuste de inclinación del respaldo (18) y ajuste la posición del respaldo. Apriete la palanca correctamente. Suelte la palanca de ajuste del ángulo del reposapiés, ajuste la posición del reposapiés y vuelva a apretar la palanca. Despliegue el reposapiés y bloquéelo con velcro. Fije la barra de seguridad. Fije y ajuste los accesorios de fijación si es necesario. El cochecito está montado.

Plegar el cochecito (con el asiento):

Accione el freno de estacionamiento y quite la barra de seguridad. Suelte la palanca de ajuste del ángulo del reposapiés, ajuste la posición del reposapiés casi en posición horizontal, unos 20 grados. Suelte el velcro del reposapiés y ciérrelo (imagen 4). Suelte la palanca de ajuste del respaldo e inclínelo hacia adelante tanto como sea posible, hacia la base del asiento (se recomienda eliminar el exceso de accesorios y ajustar el asiento a tope a lo ancho hasta su límite máximo, lo que permitirá que descienda el tamaño del cochecito plegado). Apriete la palanca. Desabroche parcialmente los protectores de barras y tire del mecanismo hacia arriba. Tire de la palanca de ajuste de inclinación del asiento y coloque la posición del asiento al máximo. Levante la empuñadura doblando las piezas móviles (imagen 6) en ambos lados y doble la empuñadura hacia las ruedas delanteras. Asegúrese que la parte inferior está bien plegada. El cochecito está plegado.

Freno de mano:

Para accionar el freno, presione completamente la almohadilla de la palanca del freno en ambos lados hasta la posición final. Para quitar el freno de mano, levante ambas pastillas de la palanca de freno.

Bloqueo de dirección:

Si es necesario, las horquillas de las ruedas delanteras se pueden bloquear contra la rotación. Para bloquear las horquillas de las ruedas, levante y gire el pasador de bloqueo giratorio 90° en ambos lados y déjelo encajar en el orificio designado en la horquilla de las ruedas.

Ajuste de altura de la empuñadura:

Para cambiar la posición de la altura de la empuñadura, presione los botones de plástico negro en las bisagras de la empuñadura en ambos lados simultáneamente (2), coloque la empuñadura en la posición deseada, suelte los botones. La empuñadura se bloqueará en la nueva posición automáticamente, escuchará el sonido de bloqueo.

Barra de seguridad:

Para quitar la barra de seguridad, presione el pasador de liberación en ambos lados simultáneamente y tire de la barra hacia arriba para quitarla. Para insertar la barra de seguridad, ambos pasadores de liberación deben apuntar hacia adelante. Presione ligeramente ambos pasadores de presión e inserte la barra de seguridad en las incrustaciones del tubo a la vez hasta que los pasadores queden bloqueados. Compruebe la posición correcta de la barra de seguridad tirando ligeramente hacia arriba; la barra de seguridad no debe levantarse.

Posición de reclinado del respaldo:

Sostenga firmemente el respaldo del asiento. Palanca de ajuste de inclinación del respaldo suelta (18). Ajuste la posición del respaldo. Apriete la palanca correctamente. Si es necesario desabrochar parcialmente la cremallera colocada en la parte trasera de la funda del respaldo para facilitar la manipulación. Verificar el correcto bloqueo de la posición del respaldo. El respaldo debe permanecer en la posición preestablecida.

Posicionamiento del ángulo del juego de reposapiés:

Presione ambos botones en la bisagra del reposapiés simultáneamente (13), ajuste la posición del ángulo del reposapiés y suelte los botones. El reposapiés se bloqueará en la nueva posición automáticamente, escuchará el sonido de bloqueo.

Posicionamiento de la altura del juego de reposapiés:

Afloje los dos tornillos hexagonales colocados en la parte trasera del perfil deslizante del reposapiés. Establezca la posición deseada del reposapiés. Apriete correctamente ambos pernos hexagonales.

Ajuste del ángulo del reposapiés:

Afloje los dos tornillos hexagonales colocados debajo de los reposapiés. Establezca el ángulo del reposapiés tirando o empujando la placa deslizante de ajuste del ángulo del reposapiés, que determina el ángulo solicitado del reposapiés. Apriete correctamente ambos pernos hexagonales.

Bloqueo de velcro del reposapiés:

Apriete y ajuste en cualquier momento el cierre de velcro colocado debajo del reposapiés para asegurar una posición fija del reposapiés. (dispositivo de seguridad contra plegado del reposapiés).

Equipamiento estándar

Cierre de seguridad de transporte:

Colocación: tire del cierre de seguridad para el transporte alrededor de la barra de conexión y el tubo vertical del marco frontal. Entrelaza el sujetador a través del lazo y fíjalo con el corchete.

Separación: desabroche y suelte el cierre.

Equipamiento opcional:

Este producto se puede suministrar opcionalmente con una muy amplia gama de accesorios de fijación y posicionamiento. Encuentre la guía del usuario de accesorios opcionales en un folleto separado.

Ajuste de la profundidad del asiento: desplazamiento del respaldo

El respaldo se puede ajustar en tres posiciones para cambiar la profundidad del asiento.

Desatornille los dos tornillos de cada lado (Figura 9). Deslice el soporte trasero en la posición deseada.

Trasero (A) / Centro (B) / Delantero (C). La posición trasera (A) es para el asiento más profundo, las posiciones delanteras (C) para el asiento menos profundo.

Luego apriete los cuatro tornillos con la llave hexagonal.

2) Cochechito en funcionamiento:

Entrar en el cochechito:

Accione los frenos. Si es necesario, pida a una persona de confianza que sujete con fuerza el cochechito.

Coloque cuidadosamente al niño en el interior del cochechito. Sujete la barra de seguridad y ajuste la

posición del reposapiés. Ponga todas las fijaciones y accesorios de posicionamiento del cochechito.

Asegúrese siempre que el niño está cómodamente sentado en el cochechito.

Salir del cochechito:

Accione los frenos. Si es necesario, pida a una persona de confianza que sujete con fuerza el cochechito.

Saque todas las fijaciones y accesorios de posicionamiento. Saque la barra de seguridad y saque al niño cuidadosamente del cochechito.

Superar las aceras y los obstáculos bajos:

Bajada. Coloque las ruedas delanteras hacia el borde de la acera. Sujete las empuñaduras con fuerza,

mueva el cochechito hacia atrás y mantenga el equilibrio con las ruedas traseras. Coloque las ruedas

traseras sobre el borde de la acera, mueva el cochechito poco a poco con ayuda de las ruedas traseras.

Subida. Coloque las ruedas delanteras cerca de la acera. NUNCA choque con las ruedas delanteras con la

acera. Sujete las empuñaduras fuertemente, mueva el cochechito hacia atrás y mantenga el equilibrio sobre

las ruedas traseras. Conduzca hacia delante y coloque las ruedas delanteras sobre el bordillo. Coloque las

ruedas traseras en la parte inferior del borde para iniciar el ascenso.

Transporte manual del cochechito:

Utilice rampas y ascensores cuando disponga de ellos.

Si no queda otra alternativa y no puede evitar las escaleras, debe contar con la ayuda de, como mínimo, una persona de confianza.

No intente subir o bajar solo diversos escalones, a menos que usted y la persona que le ayude estén seguros que controlan totalmente la manipulación.

Descanse a intervalos regulares, si se siente cansado.

Las manos del ocupante deben estar dentro del asiento durante el transporte.

NUNCA levante el cochechito por la barra de seguridad o el reposapiés.

Bajar escaleras. Sujete la empuñadura con fuerza y coloque el cochechito recto, con las ruedas delanteras en el escalón superior. Mueva la empuñadura hacia abajo y apriete el cochechito hacia delante hasta que las ruedas posteriores se encuentren al final del escalón superior. La persona que ayuda se coloca delante, sujetando la parte delantera del cochechito. Las dos personas deben levantar el cochechito al mismo tiempo. Continúe escalón por escalón hasta el final (imagen 15).

Subir escaleras. Sujete con fuerza la empuñadura y coloque el cochechito recto, con las ruedas traseras contra el último escalón. Sujete la empuñadura hacia atrás y mueva el cochechito hacia delante hasta que las ruedas traseras se encuentren al final del escalón de abajo. La persona que ayuda debe colocarse

delante del cochecito y sujetarlo por la parte delantera. Ambas personas deben levantarlo al mismo tiempo. Súbanlo por las escaleras. Continúen escalón por escalón hasta arriba (imagen 15).

Tapicería:

La tapicería del asiento es completamente extraíble y puede lavarse a mano a temperatura baja (máximo 40°C). Abra la cremallera de la tapicería en la parte trasera del respaldo. Tire de la tapicería sobre la parte superior del respaldo y fíjela al respaldo y al asiento con sujetadores de velcro. Tire de la tapicería sobre los paneles laterales de los asientos uno por uno. Abroche la cremallera del tapizado del respaldo.

MANTENIMIENTO, ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:

El cochecito ha sido diseñado con un alto estándar y con un uso y mantenimiento correctos proporcionará muchos años de servicio sin problemas.

- Asegúrese de estar familiarizado con el funcionamiento del cochecito. Siempre debe abrirse y plegarse con facilidad. Si no es así, no fuerce el mecanismo; deténgase y lea las instrucciones. de proporcionar años de servicio sin problemas.
- Inspeccione regularmente la empuñadura, los mecanismos de seguridad de la barra, los sistemas de cierre, el reposapiés, las fijaciones de las juntas y el cierre de seguridad de la empuñadura para garantizar que estén seguros, limpios y en pleno funcionamiento. Los frenos, las ruedas, los neumáticos y la tapicería pueden desgastarse y, si es necesario, deben ser reemplazados por del distribuidor oficial.
- Los frenos, las ruedas y los neumáticos están sujetos a desgaste y deben ser reemplazados si es necesario por un reparador aprobado por el proveedor del cochecito.
- Si tiene neumáticos inflables en el cochecito, verifique su inflación regularmente. La irregularidad permitida del neumático en el perímetro es de +/- 2 mm.
- Si el cochecito está dañado o necesita alguna reparación, solo los centros de servicio autorizados pueden proporcionar estos servicios.
- Para las reparaciones sólo deben utilizarse repuestos suministrados por la empresa PATRON.
- Si las partes de su cochecito se vuelven rígidas o difíciles de operar, asegúrese de que la suciedad no sea la causa, aplique una ligera aplicación de un lubricante en aerosol como WD 40 (no usar aceite ni grasa). Asegúrese de que el lubricante penetre entre los componentes, pero no rocíe demasiado, ya que esto puede favorecer la acumulación de suciedad. Limpie cualquier exceso de rociado. La lubricación regular de las piezas móviles extenderá la vida útil de su cochecito y facilitará su apertura y plegado.
- Se recomienda usar capota de lluvia cuando llueve (no es equipo estándar del cochecito).
- No exponga la silla de paseo a la radiación solar intensa de acción prolongada.
- Los componentes textiles del cochecito y/o accesorio deben usarse y almacenarse de forma que las piezas de plástico transparente no se doblen ni se tuerzan demasiado. Éstos pueden dañarse si la temperatura es de 5°C bajo cero.
- Las ruedas, las piezas de plástico y de metal se pueden limpiar con una esponja con agua tibia y un detergente suave.
- La tela del asiento debe lavarse a mano únicamente a una temperatura máxima de 40°C, no usar secadora de ropa.
- Nunca limpie con compuestos de limpieza abrasivos, a base de amoníaco, blanqueadores o a base de alcohol.
- Después de la exposición a condiciones húmedas, seque el producto con un paño suave y déjelo completamente abierto en un ambiente cálido y seco.
- Guarde su cochecito en un lugar seco y seguro con una temperatura recomendada de 5-20°C.
- Se recomienda que el cochecito sea revisado por un centro de servicio autorizado cada 12 meses.
- Recomendamos que después de 24 meses visite un servicio técnico.
- Comprobar y apretar las uniones roscadas con regularidad.
- Si hay cables de control usados (frenos, telescópicos, basculante), revíselos regularmente y, si es necesario, configúrelos y engrase.

Vida útil del producto: La vida útil esperada del producto es de 5 años. La vida útil esperada del producto se utilizó como base para el desarrollo del producto y la definición de requisitos para el uso del producto para el propósito dado. Estos datos también incluyen los requisitos de mantenimiento para garantizar la eficiencia y la seguridad necesarias del producto.

Instrucciones de desecho: Para su desecho, el producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de protección ambiental vigentes en el país donde se utilizó el producto.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. En este producto se aplican 24 meses de garantía a partir de la fecha de venta. La garantía se aplica por defectos de material y fabricación.
2. El producto debe usarse exclusivamente para el propósito para el que fue diseñado y deben seguirse las instrucciones de la guía del usuario.
3. El producto debe usarse, mantenerse, limpiarse y almacenarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de la guía del usuario.
4. No tire hacia abajo de la etiqueta de identificación. Tiene que ser legible y sin daños durante todo el período de garantía.
5. El caso de garantía debe ser reclamado por el vendedor, donde se compró el producto. La "Hoja de garantía" debidamente cumplimentada y el comprobante de compra deben declararse en la solicitud de garantía. Cada defecto debe ser reclamado inmediatamente.
6. El procedimiento de reclamación puede iniciarse cuando el dispositivo se entrega completo, en su embalaje original, cuidadosamente embalado y protegido contra daños. El propietario se compromete a entregar el aparato limpio de acuerdo con las medidas higiénicas generales. El mantenimiento y la limpieza básicos no pueden esperarse ni exigirse cuando se reclaman.
7. La garantía no cubre: fallas causadas por la sobrecarga de los productos, accidente, daño forzado, cambios no autorizados realizados en el producto y/o sus accesorios, desgaste natural de las piezas, especialmente suciedad y daños en la tapicería, desgaste del plástico piezas, frenos, perfil de neumáticos y pinchazo de neumáticos, etc.
8. La garantía finaliza siempre que surjan las siguientes condiciones: el usuario no sigue las instrucciones mencionadas en esta guía del usuario y los procedimientos de almacenamiento y mantenimiento sugeridos por el fabricante, o cuando el producto es reparado por cualquier otra parte que no sea un centro de servicio autorizado, o cuando la etiqueta identificativa no está pegada en la silla de paseo y tampoco en la hoja de garantía.
9. El período de garantía no se puede intercambiar con el período de uso, es decir, el período de por vida cuando se cumple con el uso y mantenimiento correctos del producto de acuerdo con la guía del usuario.
10. Ni el productor ni el importador son responsables de las pérdidas y lesiones causadas por la manipulación y el uso del producto en conflicto con las instrucciones de la "Guía del usuario".

El fabricante, PATRON Bohemia a.s., se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos.

NOTAS

Manufacturing and Distribution:

PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika tel.: +420-315 630
111
fax.: +420-315 630 199
Info.cz@patro.eu [http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)