

KUKINI™

Silla de ruedas especial



www.akces-med.com

Instrucciones de uso



¡ATENCIÓN!

El fabricante asume la responsabilidad del correcto funcionamiento del equipo únicamente en caso de que se haya adquirido a través de un empleado calificado de la empresa Akces-MED Sp. z o.o. o en una tienda especializada en productos médicos.


Akces-MED Sp. z o.o. se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.



Dispositivo médico de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, relativo a los productos sanitarios.



La empresa Akces-MED Sp. z o.o. ha implementado un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 13485 en el ámbito de diseño, producción, venta y servicio. El sistema está certificado por SGS.

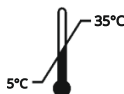

Índice

Introducción.....	4
1. Propósito de las instrucciones.....	5
2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del dispositivo.....	5
3. Estructura general del dispositivo.....	7
4. Tabla de tamaños.....	8
5. Descripción del uso del dispositivo.....	9
5.1 Despliegue del dispositivo.....	9
5.2 Plegado del dispositivo.....	10
5.3 Reposapiés ajustable.....	11
5.4 Desmontaje de las ruedas.....	12
5.5 Cinturones de seguridad de 5 puntos.....	13
5.6 Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo.....	16
5.7 Asa ajustable para empujar la silla.....	17
5.8 Freno central.....	17
5.9 Freno manual.....	17
5.10 Ajuste de los muelles.....	20
6. Uso del dispositivo.....	21
6.1 Preparación del usuario.....	21
6.2 Preparación del dispositivo.....	22
7. Reglas de seguridad.....	23
8. Condiciones de garantía.....	25
9. Mantenimiento y limpieza.....	25
10. Etiquetado.....	29

Introducción

El carrito especial para discapacitados KUKINI™ es una solución para aquellos que buscan confort, seguridad y estabilidad para sus hijos, sin renunciar a disfrutar del tiempo activo durante paseos o carreras.

Gracias a su bajo peso, el KUKINI™ es ideal tanto para paseos largos como para entrenamientos de carrera. Está diseñado para personas con una altura de 100 a 135 cm y un peso máximo de 40 kg (para el tamaño 1), así como para personas con una altura de 130 a 165 cm y un peso máximo de 65 kg (para el tamaño 2).

El respaldo ajustable permite configurar una posición óptima de sentado o semiacostado durante el viaje. Ofrece comodidad y seguridad durante el transporte y la rehabilitación diaria de personas con enfermedades que dificultan el sentado o el estar de pie de manera independiente.

Una amplia gama de accesorios permite adaptar el carrito para brindar el confort adecuado tanto al usuario como al cuidador. El KUKINI™ es una forma de pasar tiempo de manera activa junto a su hijo.

Les rogamos que lean atentamente este manual. Contiene información sobre el producto y las instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura y eficiente.

Si tienen preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros:

Consultor médico: tel. móvil +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

¡ATENCIÓN!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. Propósito de las instrucciones

¡ATENCIÓN!

Este manual contiene la información básica necesaria para: preparar correctamente el dispositivo antes de su uso, utilizarlo, así como los métodos de mantenimiento y limpieza.

El manual debe guardarse en un lugar de fácil acceso. Está destinado a las personas que brindan cuidado directo a personas con discapacidad, así como a médicos y fisioterapeutas que operan el dispositivo.

Antes de comenzar a usar el KUKINI™, el usuario (o el cuidador) debe leer este manual y seguir las instrucciones contenidas en él.

2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del dispositivo

Dispositivo médico destinado a personas con enfermedades ortopédicas, neurológicas, cardiológicas, así como a personas postoperatorias, con disfunciones significativas del aparato locomotor, que no han adquirido la habilidad de sentarse por sí mismas o que tienen grandes dificultades para adoptar y mantener una posición sentada.

Está indicado tanto para personas con gran flacidez y disminución del tono muscular, como para aquellas que padecen espasticidad. El dispositivo también puede ser muy útil para personas que requieren alivio prolongado de una o ambas extremidades inferiores. Es una ayuda indispensable en el proceso de rehabilitación, tanto en el aspecto físico como en la integración social. Resulta ideal para la terapia y el juego, así como para otras actividades diarias como el aprendizaje o la ingesta de alimentos. La elección del tamaño adecuado del dispositivo depende de las indicaciones médicas y de los parámetros anatómicos, independientemente de la edad del usuario.

El dispositivo está recomendado para personas diagnosticadas con:

- Parálisis cerebral infantil (PCI) - diversas formas,
- Lesiones cerebrales y de la médula espinal de diversas etiologías con parálisis de las extremidades, trastornos graves del equilibrio y coordinación de los movimientos
- Enfermedades desmielinizantes avanzadas (esclerosis múltiple - EM, esclerosis lateral amiotrófica - ELA y otras),
- Hernia meningo-raquídea,
- Enfermedades musculares con parálisis y debilidad muscular (distrofias, miastenia, polimiositis). Síndromes genéticos que cursan con debilidad de las extremidades inferiores,
- Enfermedades degenerativas y reumáticas de las articulaciones,
- Otras enfermedades que cursan con debilidad, parálisis o daños en el sistema musculoesquelético,
- Después de traumatismos, lesiones craneoencefálicas o lesiones de la columna vertebral con daño de la médula espinal, con debilidad y parálisis, especialmente con parálisis de las cuatro extremidades.

2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del dispositivo

Contraindicaciones:

- Estado crítico del usuario,
- Parálisis,
- Sedación profunda,
- Fracturas inestables con indicaciones ortopédicas específicas, incluyendo fracturas de la columna vertebral,
- Tromboembolia venosa no tratada,
- Inestabilidad hemodinámica,
- Trastornos de la función cerebral detectados al estar sentado en posición vertical,
- Artritis severa de la columna cervical,
- Embolia pulmonar,
- Infarto agudo de miocardio en las últimas 24 horas,
- Heridas postquirúrgicas frescas o heridas que no cicatrizan en la zona de la espalda, la pelvis, las articulaciones de la cadera y los muslos,
- Los usuarios con trastornos mentales no deben ser dejados en el dispositivo sin supervisión de un cuidador.

3. Estructura general del dispositivo

ASIDERO ERGONÓMICO PARA EMPUJAR LA SILLA

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA MUÑECA

RUEDAS TRASERAS DESMONTABLES CON CÁMARA DE AIRE

RUEDA DELANTERA DESMONTABLE CON CÁMARA DE AIRE

RESPALDO CON AJUSTE DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN, EQUIPADO CON UN BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS CON CIERRE MAGNÉTICO

COJÍN DE ASIENTO CON ESPUMA VISmemo™

REPOSAPIÉS AJUSTABLE



ESTRUCTURA PLEGABLE DE ALUMINIO EQUIPADA CON FRENOS DE DISCO EN LA RUEDA DELANTERA Y FRENOS CENTRALES EN LAS RUEDAS TRASERAS

MOCHILA VOYAGER



¡INFORMACIÓN!

La información sobre los accesorios está disponible en el sitio web akces-med.com en la sección del producto.

4. Tabla de tamaños



Símbolo	Medición	Unidad	Talla 1	Talla 2
W	altura aproximada del usuario *	[cm]	100 - 135	130 - 165
A	anchura del asiento	[cm]	37	43
L	profundidad del asiento	[cm]	37	41
C	altura del reposacabezas	[cm]	47 - 60	60 - 78
C1	altura del respaldo	[cm]	60	78
E	anchura del respaldo	[cm]	36	42
F	longitud del reposapiés	[cm]	27, 40	35, 45
	altura del asa guía	[cm]	90 - 120	87 - 135
X	ángulo del respaldo	[°]	95 - 130	95 - 130
Y	ángulo de inclinación del asiento	[°]	20	20
Z	ángulo de inclinación del reposapiés	[°]	125	125
	peso máx. del usuario	[kg]	40	65

Dimensiones y peso del equipo	Unidad	Talla 1	Talla 2
anchura	[cm]	67	74
anchura plegada **	[cm]	54	60
longitud mínima	[cm]	124	141
longitud máxima	[cm]	143	169
longitud plegada **	[cm]	97	103
altura	[cm]	105	107
altura plegada **	[cm]	38	38
peso ***	[kg]	14	16,5

Nota: La tolerancia de las dimensiones incluidas en la tabla es de +/- 1 cm.

* La altura no debe ser la base para la selección del dispositivo.

** Las dimensiones plegada se refieren a la silla de ruedas con las ruedas y el reposapiés desmontados.

*** El peso se refiere al equipamiento estándar de la silla de ruedas.

5. Descripción del uso del dispositivo

5.1 Despliegue del dispositivo

¡INFORMACIÓN!

El carrito tiene la posibilidad de desmontar las ruedas. Esto permite reducir las dimensiones del dispositivo, facilitando su transporte o almacenamiento.

El montaje de las ruedas se detalla en la página 12 del manual.



¡ATENCIÓN!

Se debe prestar especial atención a los elementos desplegable del marco del carrito, ya que representan un riesgo de lesiones.

Entre los elementos móviles pueden encontrarse piezas de tapicería. En ese caso, deben retirarse con especial cuidado.

Antes de comenzar a usar el carrito, se debe verificar que todos los elementos estén correctamente bloqueados y que la tapicería esté adecuadamente montada (que los broches de sujeción estén correctamente abrochados). Existe la posibilidad de que los broches de sujeción se desabrochen accidentalmente al plegar el carrito.

Cada broche de sujeción de la tapicería debe estar absolutamente abrochado.

5. Descripción del uso del dispositivo

5.2 Plegado del dispositivo



¡INFORMACIÓN!

Recomendamos quitar el reposapiés antes de comenzar a plegar el carrito.

Existe el riesgo de dañar el reposapiés al golpearlo contra el suelo durante el proceso de plegado del dispositivo.

¡ATENCIÓN!

Se debe prestar especial atención a los elementos plegables del marco del carrito, ya que representan un riesgo de lesiones.

Entre los elementos móviles no deben encontrarse piezas de tapicería.



¡INFORMACIÓN!

Es importante asegurarse de que la cerradura esté correctamente bloqueada antes de desplegar el carrito.

El dispositivo tiene la posibilidad de desmontar las ruedas, lo que permite reducir sus dimensiones para almacenamiento. Consulte la sección 5.4 Desmontaje de las ruedas en la página 12 del manual.

5. Descripción del uso del dispositivo


5.3 Reposapiés ajustable

¡INFORMACIÓN!

Para cambiar la altura del reposapiés, debe presionar las palancas ubicadas debajo del mismo, utilizando los orificios situados a ambos lados.

Es posible ajustar la altura en tres niveles.

Recuerde asegurar la protección del reposapiés abrochando la correa detrás de su estructura.

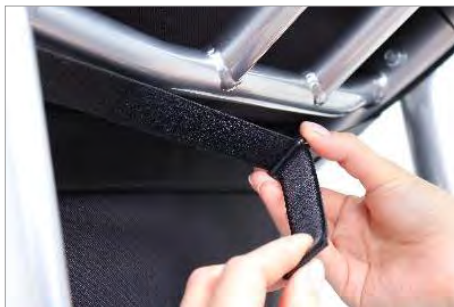

5. Descripción del uso del dispositivo

5.3 Reposapiés ajustable



5.4 Desmontaje de las ruedas

RUEDA DELANTERA



RUEDAS TRASERAS




5. Descripción del uso del dispositivo

5.5 Cinturones de seguridad de 5 puntos

i ¡INFORMACIÓN!


Los cinturones deben montarse en la altura seleccionada en el respaldo del carrito, eligiendo los orificios de la tapicería a la misma altura.

Cada vez antes de usar el carrito, asegúrese de abrochar los cinturones de seguridad de 5 puntos y verificar que estén correctamente cerrados.

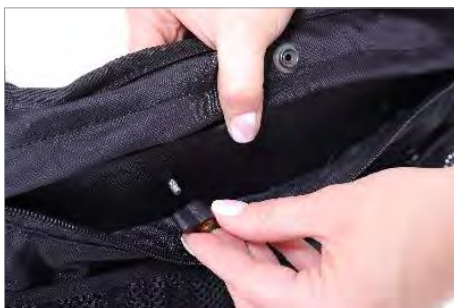




i ¡INFORMACIÓN!

El soporte superior de los cinturones se encuentra detrás del respaldo. Al desplegar el bolsillo del respaldo, debe instalar las tuercas.

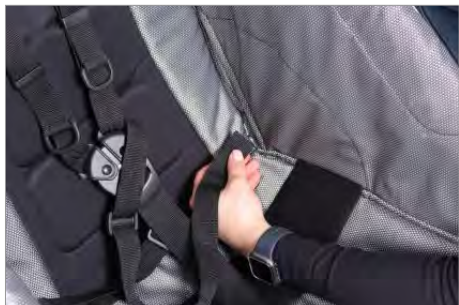




5. Descripción del uso del dispositivo

5.5 Cinturones de seguridad de 5 puntos

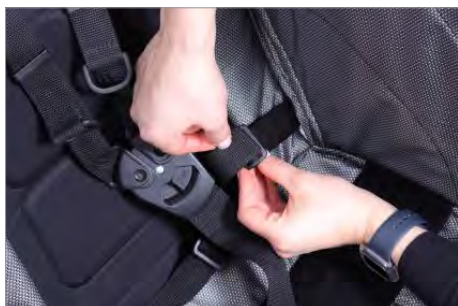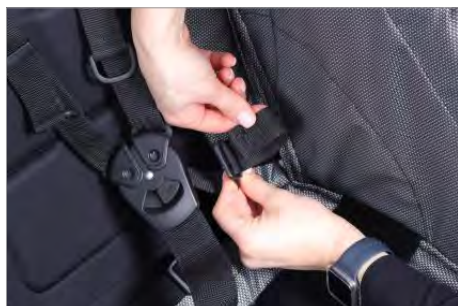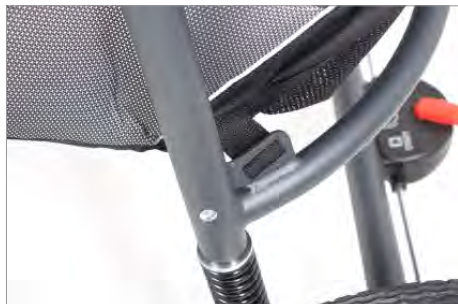

5. Descripción del uso del dispositivo

5.5 Cinturones de seguridad de 5 puntos

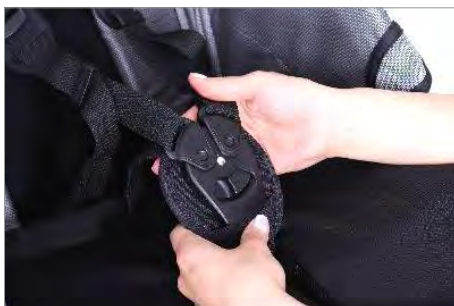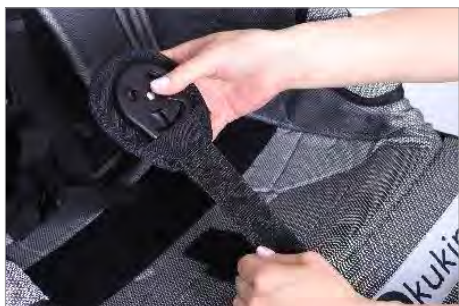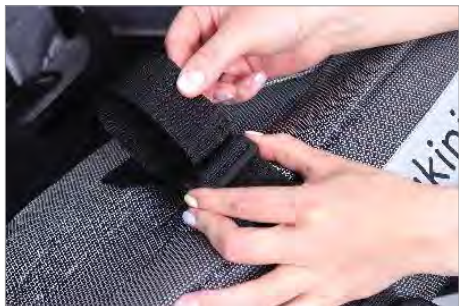

DESMONTAJE DE LAS CORREAS





¡ATENCIÓN!

Antes de comenzar a usar el dispositivo, se debe verificar que los cinturones estén correctamente abrochados.

5. Descripción del uso del dispositivo

5.6 Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo

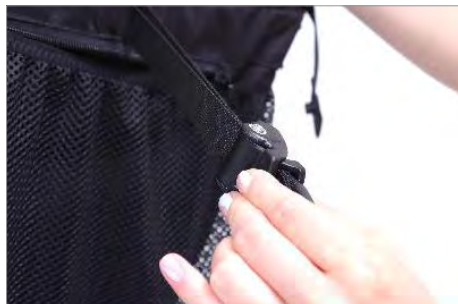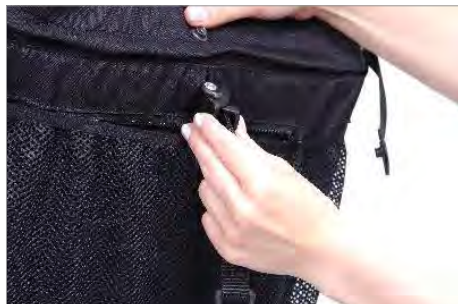

¡INFORMACIÓN!

Antes de comenzar a usar el dispositivo, se debe verificar que el elemento de bloqueo del respaldo esté correctamente fijado.

La capacidad máxima de carga del bolsillo detrás del respaldo es de 1 kg.

5.7 Asa ajustable para empujar la silla



¡INFORMACIÓN!

En el asa para empujar el carrito se encuentra un cinturón de seguridad para la muñeca, el cual, al ser colocado por el cuidador, evita el alejamiento involuntario del carrito.

5. Descripción del uso del dispositivo

5.8 Freno central



¡ATENCIÓN!

El freno central cumple la función de freno de estacionamiento del carrito.

5.9 Freno manual

¡ATENCIÓN!

El freno manual se utiliza únicamente para frenar el carrito, por ejemplo, al descender por una pendiente.



AJUSTE DEL FRENO MANUAL

¡INFORMACIÓN!

Las pastillas de freno pueden desgastarse o desajustarse, lo cual es un fenómeno común debido al uso del dispositivo.

En caso de que ocurra, las pastillas deben ser reemplazadas y/o los espacios entre ellas deben ser reajustados, tanto en el lado interno como en el externo del disco de freno.

El esquema de ajuste se encuentra en las páginas 18 y 19 del manual de usuario.


5. Descripción del uso del dispositivo

5.9 Freno manual - esquema de ajuste

⚠ ¡ATENCIÓN!

Es importante ajustar simultáneamente tanto la distancia en el lado interno como en el externo. Ajustar solo una de las distancias puede causar:

- contacto de las pastillas con el disco de freno,
- obtención de una fuerza de frenado insuficiente,
- contacto del disco de freno con las pinzas durante el frenado.

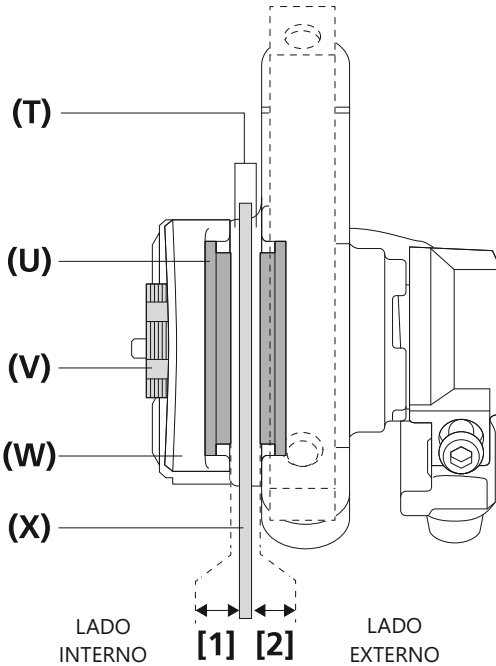

i ¡INFORMACIÓN!

Se pueden utilizar las pastillas de freno hasta que su grosor sea al menos de 0,5 [mm].

SÍMBOLOS:

- (T) HENDIDURA DEL DISCO
- (U) PASTILLA DE FRENO
- (V) TORNILLO DE AJUSTE DE LA PASTILLA
- (W) PINZA
- (X) DISCO DE FRENO
- (Y) RUEDA DE AJUSTE DEL CABLE
- (Z) TUERCA DE AJUSTE DEL CABLE

PASO 1.

Ajustar ambas distancias entre el disco de freno y las pastillas de freno:

lado interno [1] = lado externo [2].

Distancia entre las pastillas [1] [2]: 0,2 - 0,5 [mm].

5. Descripción del uso del dispositivo

5.9 Freno manual - esquema de ajuste


LADO INTERNO

PASO 2.

Ajustar las pastillas utilizando el tornillo de ajuste.

SÍMBOLOS:

(V) TORNILLO DE AJUSTE DE LA PASTILLA

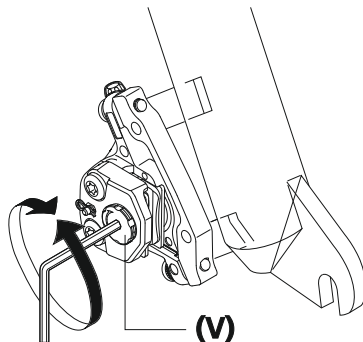

LADO EXTERNO



PASO 3.

Ajustar los cables girando las ruedas de ajuste en las pinzas y en las palancas de freno.

SÍMBOLOS:

(Y) RUEDA DE AJUSTE DEL CABLE

(Z) TUERCA DE AJUSTE DEL CABLE

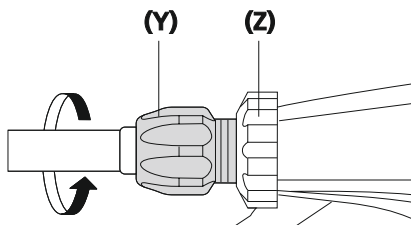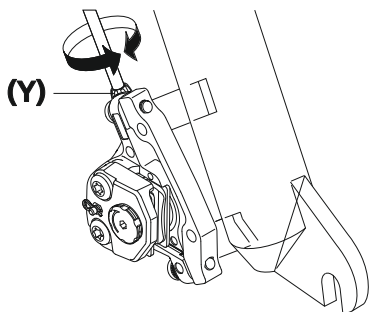

5. Descripción del uso del dispositivo

5.10 Ajuste de los muelles

¡INFORMACIÓN!

El carro tiene la posibilidad de ajustar la dureza de los muelles, lo que permite endurecer la estructura o aumentar su amortiguación.

El ajuste debe realizarse utilizando la llave incluida en el conjunto.



6. Uso del dispositivo

¡ATENCIÓN!

Antes de comenzar a utilizar el producto, se debe leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones que contiene.

Antes de cada uso, se debe preparar tanto al usuario como al dispositivo.

6.1 Preparación del usuario

Antes de comenzar a utilizar el producto, se debe asegurar lo siguiente:

- la ropa del usuario debe ser ligera y no restrictiva para los movimientos,
- el calzado debe ser cómodo y proporcionar una buena estabilización de los tobillos,
- el usuario no debe ser colocado en el producto sin ropa que cubra las partes del cuerpo que estén en contacto con la tapicería, por razones higiénicas y para evitar rozaduras en la piel,
- en el caso de utilizar cualquier tipo de ayuda adicional, como cánulas, drenajes, bolsas, catéteres, etc., deben estar adecuadamente aseguradas para evitar que se caigan, se tiren o se cierren, de manera que no interfieran durante el uso del producto,
- colocar productos ortopédicos (collares cervicales, corsés, ortesis, calzado ortopédico, etc.) en caso de ser necesario según las indicaciones.

¡ATENCIÓN!

La vestimenta debe proteger la piel del usuario del contacto directo con la tapicería y otros elementos del dispositivo.

La decisión sobre el uso de determinados productos ortopédicos debe ser tomada por el médico o fisioterapeuta a cargo.

6. Uso del dispositivo

6.2 Preparación del dispositivo

1. Para comenzar a utilizar correctamente el producto, se debe:
 - desplegar el producto,
 - verificar la correcta instalación de las ruedas y el nivel de inflado. si hay poco aire, inflar las ruedas, asegurándose de no superar la presión máxima de 2,4 bares,
 - colocar el producto sobre una superficie plana y nivelada, permitiendo un fácil acceso al mismo, alejándolo de fuentes de fuego y altas temperaturas,
 - asegurarse de que todas las partes estén en buen estado, debidamente fijadas y estables,
 - activar los frenos,
 - ajustar el producto a las dimensiones del usuario,
 - desabrochar los cinturones de seguridad de 5 puntos o cualquier otro elemento utilizado para estabilizar y asegurar al usuario, para permitir una colocación cómoda en el producto,
 - colocar al usuario en el producto,
 - abrochar los elementos de estabilización del usuario,
 - ajustar los elementos de soporte y posicionamiento del usuario (si los tiene),
 - instalar los accesorios (si los tiene).
2. En el caso de usuarios con incontinencia urinaria, se deben utilizar protectores higiénicos. Estos pueden adquirirse en farmacias o tiendas de productos médicos.

¡ATENCIÓN!

Antes de comenzar a utilizar el producto, se debe asegurar que todos los cinturones y sistemas de seguridad estén correctamente ajustados y abrochados, y que las fijaciones de los elementos ajustables estén bien apretadas.

Al superar obstáculos (bordillos, aceras, etc.), se debe levantar la rueda delantera presionando el mango de dirección, colocarla en el escalón y luego introducir las ruedas traseras.

Se debe tener cuidado de no inclinar el carrito demasiado hacia atrás, ya que esto podría causar una pérdida de estabilidad. La carga máxima en el bolsillo del carrito, ubicado detrás del respaldo, es de 1 kg.

Al subir pendientes o rampas, siempre se debe orientar el carrito en la dirección de la marcha.

Durante el uso del carrito, siempre se debe usar la correa para la muñeca y sujetar el mango de dirección para evitar que el carrito se mueva por sí mismo.

El producto solo cumplirá correctamente su función si está ajustado a las dimensiones del cuerpo del usuario.

El principio principal al ajustar el producto es garantizar la máxima sensación de seguridad para el usuario. No se debe forzar el cambio de posición del cuerpo del usuario si esto puede causar incomodidad.

El uso incorrecto del producto puede llevar a la consolidación de patrones posturales incorrectos.

7. Reglas de seguridad

¡ATENCIÓN!

KUKINI™ debe ser utilizado de acuerdo con las recomendaciones de este manual.

Antes de cada uso, se debe preparar tanto al usuario como al dispositivo.

Antes de decidir la compra del producto, se debe consultar a un médico especialista o fisioterapeuta sobre la correcta selección del mismo. Antes de utilizar el producto, se debe familiarizarse con todas las indicaciones del manual adjunto.

- 1) Antes de cada uso del producto, se debe:
 - revisar el producto en busca de daños visibles u otros defectos que puedan poner en peligro al usuario durante el uso,
 - asegurarse de que todas las partes estén correctamente montadas y que el producto no presente grietas o deformaciones,
 - verificar que no se hayan aflojado tornillos, tuercas y otras conexiones roscadas, pegadas, cosidas, etc.,
 - comprobar el estado de la tapicería para asegurarse de que no esté dañada,
 - verificar el correcto funcionamiento de los frenos,
 - comprobar el funcionamiento correcto de las hebillas,
 - siempre utilizar los cinturones de seguridad, asegurándose de que las cintas se solapen al menos 8 cm,
 - ajustar el producto a las dimensiones y necesidades del usuario, configurando los elementos ajustables del producto de manera adecuada,
 - asegurarse de que las partes móviles y las ruedas de ajuste del producto estén estables y bloqueadas,
 - asegurar al usuario con los elementos estabilizadores disponibles en el equipo, con el fin de evitar que el usuario se caiga o se deslice fuera del producto,
 - verificar la correcta instalación de las ruedas y el nivel de inflado. Si es necesario, inflar las ruedas, asegurándose de no superar la presión máxima de 2,4 bares.
2. Se prohíbe el uso del producto de manera no prevista para él.
3. Se prohíbe el uso del producto si la tapicería no está correctamente instalada.
4. Se prohíbe el uso del producto si está dañado o le falta alguna parte.
5. Se prohíbe dejar al usuario en el producto sin la supervisión de un adulto.
6. No se debe utilizar el producto si no hay un cuidador cercano que haya leído el manual de instrucciones.
7. Se prohíbe dejar el producto con el usuario sin supervisión en un área inclinada o irregular.
8. Se prohíbe subir o bajar el producto por las escaleras, tanto con el usuario como sin él.



7. Reglas de seguridad

9. El usuario debe subir y bajar del producto siempre con los frenos activados.
10. Se debe tener cuidado de que, durante el proceso de subir o bajar, el usuario no pise el reposapiés.
11. Se debe prestar atención para que, durante el uso del producto, las extremidades del usuario no queden atrapadas entre los elementos ajustables del dispositivo.
12. El producto debe ser almacenado y utilizado lejos de fuentes de fuego o altas temperaturas. También, no debe ser almacenado ni utilizado en lugares con alta humedad.
13. Durante el transporte del producto sin el usuario, debe ser bien asegurado para evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por un transporte inadecuado del producto.
14. Antes de usar el producto, se deben retirar todos los empaques de papel y plástico. El empaque no es un juguete. Mantenerlo alejado de niños y animales.

¡ATENCIÓN!

Una configuración incorrecta del producto puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformaciones corporales, sobrecarga de las articulaciones, entre otros. En caso de que ocurran, se debe interrumpir inmediatamente el uso del producto, retirar al usuario del dispositivo y acostarlo. Si los síntomas persisten, se debe contactar inmediatamente con un médico o fisioterapeuta. Si los síntomas desaparecen, se debe informar al médico tratante o fisioterapeuta para tomar decisiones sobre el progreso de la rehabilitación.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del país miembro en el que el usuario reside.

Se prohíbe transportar al usuario en el producto dentro de medios de transporte (por ejemplo, automóvil, autobús, tren).

El producto contiene pequeñas piezas que pueden representar un peligro de asfixia para el usuario.

No se debe usar el producto si presenta signos de daño, deterioro o desgaste. Solo un producto completamente funcional, utilizado según las instrucciones, es seguro para el usuario. En caso de daño, se debe dejar de usar el producto y contactar al fabricante.

No se debe intentar reparar el producto por cuenta propia ni realizar cambios en su construcción, ya que esto pone en peligro al usuario y anula la garantía del producto.

Se debe tener en cuenta que cualquier carga suspendida del mango de dirección puede afectar su estabilidad.

La carga máxima en el bolsillo detrás del respaldo del producto es de 1 kg.

La carga máxima en la cesta debajo del asiento del producto es de 3 kg.

No se debe exceder el peso máximo permitido del usuario indicado en la placa de identificación y en la tabla de tamaños en la página 8 del manual.

8. Condiciones de garantía

- Akces-MED Sp. z o.o. vende productos técnicamente operativos, libres de defectos de diseño, montaje, materiales, etc.
- El producto está cubierto por una garantía de 24 meses, contados desde la fecha de compra por parte del usuario. Durante este período, el fabricante garantiza reparaciones dentro del servicio gratuito, de acuerdo con la tarjeta de garantía.
- Los daños ocurridos después de 24 meses pueden ser reparados a costo del usuario.
- El fabricante establece una vida útil del producto de 48 meses. Después de este período, el usuario puede continuar usando el producto solo si lo envía al fabricante para una revisión. Tras la revisión, el fabricante determinará nuevamente la vida útil del producto y la fecha de la próxima revisión.
- En caso de daño del producto, se debe contactar con el distribuidor donde se compró el producto o con el Departamento de Atención al Cliente de Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).

9. Mantenimiento y limpieza

KUKINI™ como producto médico, debe mantenerse limpio y utilizado según las recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe ser almacenado en un lugar limpio, seco y ventilado. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza y el mantenimiento periódicos son esenciales para mantener su funcionamiento adecuado y garantizar la seguridad.

Recomendaciones para la limpieza de la tapicería y los componentes del producto:

1. Lavar a mano, en seco o químicamente sin usar disolventes a una temperatura máxima de 40°C.
2. Asegúrese de eliminar el exceso de humedad de la tapicería antes de su limpieza posterior.
3. Evite el uso de cepillos duros.
4. No limpie, reemplace piezas ni realice mantenimiento del producto mientras lo esté usando el usuario.
5. En caso de pequeñas manchas, lavar con agua tibia usando un paño suave humedecido con un limpiador suave y de uso común.
6. El uso de un paño demasiado mojado puede agravar las manchas o dañar la tapicería o la espuma en su interior.
7. Después de limpiar las manchas, debe pasar un paño limpio y húmedo sobre la tapicería, y luego secarla.
8. No debe limpiar la tapicería con productos químicos fuertes como disolventes o productos corrosivos a base de cloro.
9. Los componentes metálicos y plásticos deben limpiarse a mano con productos de limpieza comunes para plásticos, asegurándose de seguir las recomendaciones del fabricante de dicho limpiador.

9. Mantenimiento y limpieza

10. Es posible desinfectar los componentes metálicos, plásticos, de madera y tapicería del producto utilizando un líquido desinfectante de uso común. Para desinfectar un componente seleccionado, se debe rociar su superficie con un desinfectante disponible en el mercado y luego frotarla con un paño seco y limpio. Después de la desinfección, se debe esperar a que el componente se seque completamente, especialmente en el caso de la tapicería. Al elegir un desinfectante a base de alcohol, primero se debe verificar en un área discreta si el producto no decolora ni daña la superficie que se va a desinfectar.

¡ATENCIÓN!


Antes de quitar la tapicería para lavarla, recuerde desenroscar los tornillos que aseguran la tapicería en ambos lados del carrito. Al volver a colocar la tapicería, asegúrese de apretar nuevamente los tornillos de seguridad de manera firme y sin excepción.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



llave imbus
de 3 mm

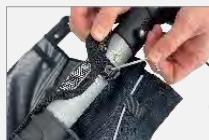

Antes de comenzar a usar el producto, debe:

- limpiar las ruedas de cualquier suciedad,
- verificar que las ruedas estén correctamente montadas, no dañadas y que los frenos bloqueen el giro de las ruedas,
- comprobar que la estructura del producto no muestre signos de grietas o otras deformaciones,
- asegurarse de que todas las partes móviles se muevan en su rango completo y que todos los tornillos, tuercas, perillas, etc. estén completos y bien apretados,
- verificar que las correas de los elementos estabilizadores y de seguridad no estén desgastadas o rotas, y que los broches y hebillas funcionen correctamente,

¡ATENCIÓN!

¡Antes de volver a usar el producto, la tapicería debe estar completamente seca!

El fabricante Akces-MED Sp. z o.o. no se hace responsable por daños causados por el uso de productos de limpieza inapropiados.

El fabricante solo es responsable de los defectos ocultos o daños técnicos ocurridos durante el uso correcto del producto. Solo si se siguen estrictamente estas recomendaciones, la responsabilidad por el correcto funcionamiento del producto recae en el fabricante.

En caso de cualquier daño, se debe contactar con el distribuidor autorizado donde se compró el producto o con el Departamento de Atención al Cliente de Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).



9. Mantenimiento y limpieza

REVISIÓN TÉCNICA

Las revisiones técnicas deben realizarse de manera regular. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, se debe limpiar a fondo el producto para detectar posibles daños ocultos.

Frecuencia	¿Qué hay que comprobar?	Actividades	Comentarios
Antes de cada uso.	Estado general del producto.	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> que no haya daños visibles, grietas o defectos mecánicos en todo el producto, que el producto esté completo, que todos los pernos, tornillos, pomos, tuercas y otros elementos estructurales del producto estén completos y apretados. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Ruedas y frenos.	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> levantando la base, que las ruedas están correctamente fijadas, no dañadas, que el freno activo bloquea la rueda giratoria, que las ruedas no estén sucias. Limpie las ruedas de cualquier suciedad. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Fijaciones de componentes estructurales.	<p>Revisar todos los mecanismos del carrito y sus componentes móviles, en particular, verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> la correcta instalación del asiento (si aplica), la correcta instalación de las ruedas (si aplica), la correcta instalación y funcionamiento de los elementos de seguridad del usuario (si aplica), que todas las partes móviles estén completas, se muevan en su rango completo y no se atasquen, el correcto funcionamiento de los mecanismos de ajuste (si aplica) de elementos como: reposacabezas, respaldo, asiento, cuña intercrustral, reposabrazos, reposapiés. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Elementos de tapicería.	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> los elementos de tapicería en busca de daños, desgarrones, grietas, costuras flojas o deformaciones, que las correas de estabilización del usuario, los chalecos y los cinturones de seguridad no estén desgastados, retorcidos, y que los broches y hebillas funcionen correctamente, que las correas de estabilización del usuario, los chalecos y los cinturones de seguridad estén correctamente instalados y no se desabrochen bajo presión o tirón. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
Una vez a la semana.	Limpieza del producto.	Limpie la estructura y el tapizado del producto de la suciedad resultante del uso diario (polvo, barro u otros) con un paño húmedo y un producto de limpieza suave de uso general. Elimine la suciedad (por ejemplo, pelos, restos de comida, etc.) de las partes móviles del producto.	Limpie el producto siempre que sea necesario, pero al menos una vez a la semana. No utilice limpiadores a base de cloro ni alcoholes metilados. La tapicería debe estar seca antes de utilizar el producto.

9. Mantenimiento y limpieza

REVISIÓN TÉCNICA

Las revisiones técnicas deben realizarse de manera regular. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, se debe limpiar a fondo el producto para detectar posibles daños ocultos.

Frecuencia	¿Qué hay que comprobar?	Actividades	Comentarios
Una vez al mes.	Ejes de ruedas, acoplamientos rápidos (si procede).	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> que las ruedas giran libremente sobre los ejes y que no hay holgura en los ejes. <p>Mantenimiento: Aplique una pequeña cantidad de mantenimiento y lubricante entre el eje y el cubo de la rueda. Compruebe que la rueda esté bien encajada.</p>	<p>Si encuentra suciedad, limpie las ruedas de restos de comida, polvo, pelos u otros residuos.</p> <p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Conexiones de la estructura del producto (soldadas, roscadas, con	<p>Comprobar:</p> <ul style="list-style-type: none"> el estado del armazón del producto en las uniones (soldaduras, roscas, soldaduras). 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Neumáticos, cámaras de aire (si procede).	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> el estado de desgaste de la banda de rodadura. Compruebe si hay daños visibles. Compruebe el nivel de presión de las ruedas (si procede). 	<p>Si la presión de las ruedas es demasiado baja, infle las ruedas hasta el nivel correcto.</p> <p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
Una vez cada 6 meses.	Elementos de diseño móviles.	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> las partes móviles de la estructura por si presentan daños y realizar su mantenimiento con un agente especializado. 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Etiquetado del producto.	<p>Compruebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> la legibilidad de las marcas y la etiqueta del producto. 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
Al final de la vida útil del producto.	Descripción detallada del producto.	Resumen del producto.	<p>El fabricante especifica la vida útil del producto, que figura en las instrucciones de uso. Transcurrido este periodo, el usuario sólo podrá utilizar el producto si lo devuelve al fabricante para su inspección. Tras la inspección, el fabricante volverá a especificar la vida útil del carro y la fecha de la próxima inspección.</p> <p>Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Concesionario/Distribuidor al que adquirió el producto o con el Fabricante.</p>

10. Etiquetado

CE Certificado de conformidad del producto con los requisitos esenciales de la normativa de la UE

REF Número de catálogo

SN Número de serie

i Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo

! ¡Atención!

Factory Fabricante

Calendar Fecha de producción

MD Dispositivos médicos

LATEX El producto no contiene látex

Umbrella Almacenar en un lugar seco

Sun Proteger de la luz solar

Thermometer Limitación de la temperatura de almacenamiento

Humidity Humedad relativa de almacenamiento

Vertical Secado vertical

No Dryer No secar en secadora

No Chlorine No clorar

No Iron No planchar

Hand Wash Lavar a mano

40 Lavar a máx. 40°C

Chemical Clean Limpieza química

P Limpieza en seco sin disolventes

No Bleach No blanquear

Glass Contenido cuidado y delicado

No Seatbelt Prohibición de utilizar el producto sin los cinturones de seguridad abrochados

No Stairs Prohibición de bajar escaleras, tanto con usuario como sin él

No Unattended Prohibición de dejar al usuario desatendido mientras utiliza el producto

i Lea la siguiente información adicional

PRESS Pulse el botón que aparece en la imagen

Wrench Para el montaje es necesario utilizar las herramientas indicadas en la descripción

Ejemplo de placa de características

NOMBRE DEL PRODUCTO ES NOMBRE DEL PRODUCTO EN

CÓDIGO QR — UNA VEZ ESCANEADO, LE DIRIGE A LA PÁGINA WEB DE PRODUCTOR

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

CARGA MÁXIMA ADMISIBLE CARGA DEL PRODUCTO

NÚMERO DE SERIE EN FORMA DE CÓDIGO DE BARRAS

NOMBRE DEL PRODUCTO ES: **AKCEMED**
www.akce-med.com

NOMBRE DEL PRODUCTO EN: **KUKINI 1**
COCHECITO PARA NECESIDADES ESPECIALES
KUKINI 1
SPECIAL NEEDS STROLLER

CÓDIGO BAR

MARCADO

FECHA DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE SERIE

AKCEMED Sp. z o.o.
Jasionka 9563
98-022 JASIONKA
POLAND

CARGA MÁXIMA: 40 kg

02.2024

MD

i

CE

5 903816 418191

SN

KKN 007/U/1/BB

PRODUTOR



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619

Representante autorizado