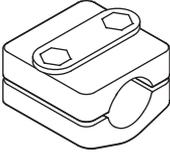
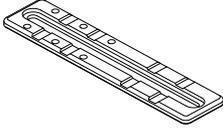


Soporte de brazo dinámico

INSTRUCCIONES: PIEZAS DE MONTAJE

ART NOS.: AS118, AS119, AS120

		
AS118	AS119	AS120
Abrazaderas de montaje del apoyabrazos	Abrazaderas de montaje del apoyabrazos	Placa de montaje del apoyabrazos
Compatibles con tubos redondos para apoyabrazos de Ø22/25 mm [7/8"/1"]	Compatibles con tubos redondos para apoyabrazos de Ø19 mm [3/4"]	Compatible con apoyabrazos planos

⚠️ADVERTENCIA! Este producto debe ser instalado y ajustado por un técnico en rehabilitación calificado.

⚠️ADVERTENCIA! Al instalarlo, verifique que el soporte de brazo quede firmemente bloqueado con la placa adaptadora de desacoplamiento rápido. El instalador debe poder escuchar un sonoro "clic".

⚠️ADVERTENCIA! Si se produce un incidente serio relacionado con el uso de este producto, se debe informar al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a las autoridades locales competentes.

VERIFICACIONES PERIÓDICAS DE LA SEGURIDAD Y EL DESEMPEÑO

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto se debe verificar de manera periódica en busca de señales de desgaste y comprobar su funcionamiento. Si el producto no funciona correctamente o si se verifica un desgaste significativo de sus piezas, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su proveedor para que Bodypoint® realice las reparaciones adecuadas o su reemplazo. Ninguna persona no calificada debe alterar o reparar el producto bajo ninguna circunstancia.

GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía limitada de por vida debido a defectos de fabricación y de los materiales, que surjan del uso normal por parte del consumidor original. Póngase en contacto con su proveedor o con Bodypoint® por reclamos amparados por la garantía. Para obtener más información acerca de los productos Bodypoint®, así como datos sobre distribuidores fuera de los EE. UU., visite www.bodypoint.com.



558 1st Ave. S., #300, Seattle, WA 98104, USA | 206.405.4555 | 800.547.5715 | www.bodypoint.com




Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PG Terwolde
The Netherlands




Medical
Device


AS118

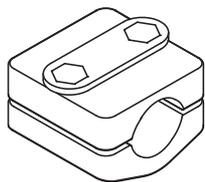


AS119

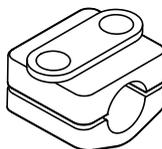





1

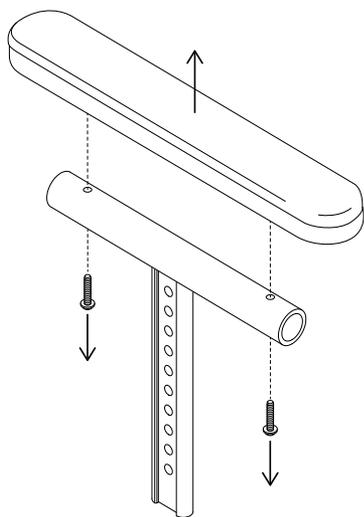


2

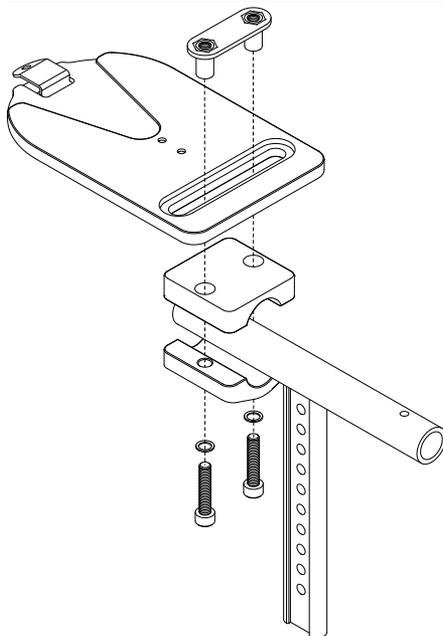


AS120

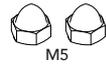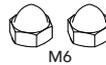
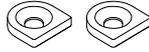
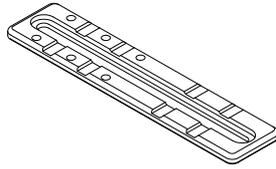



1

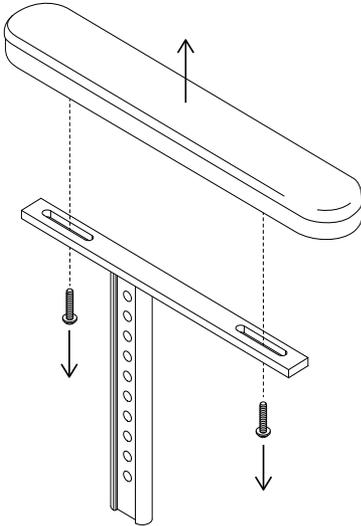


2

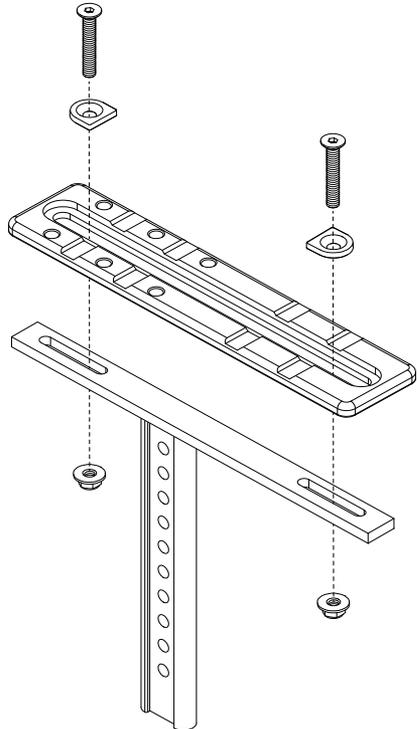


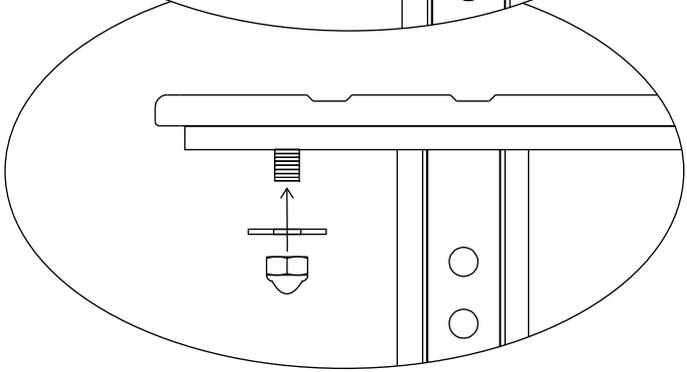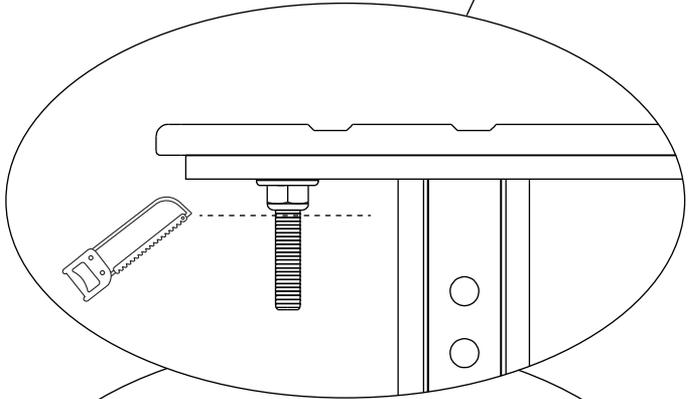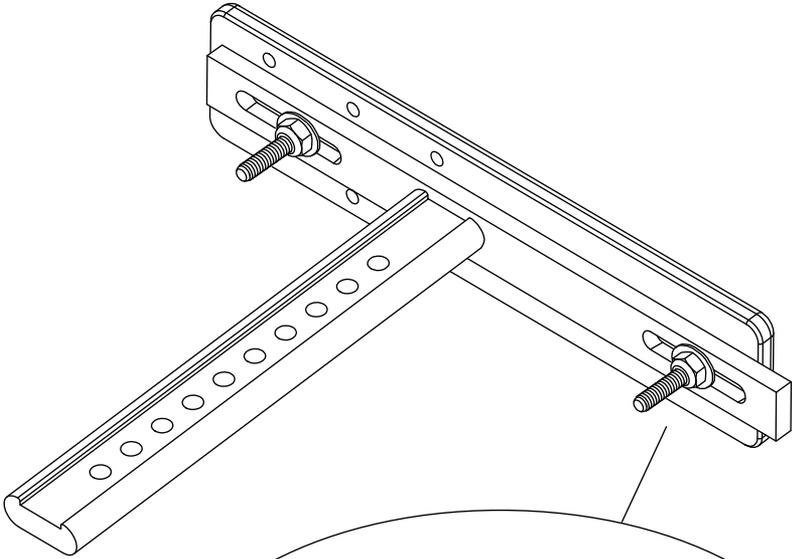


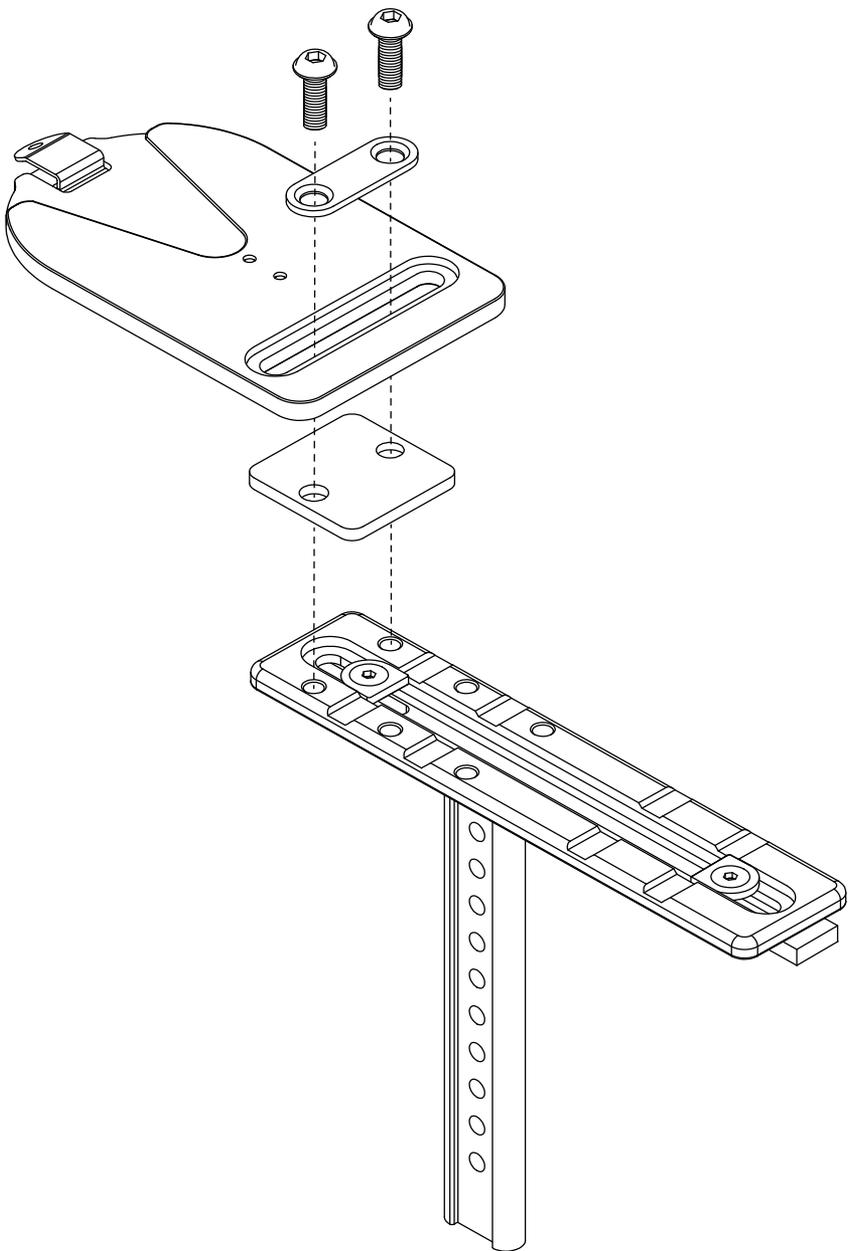

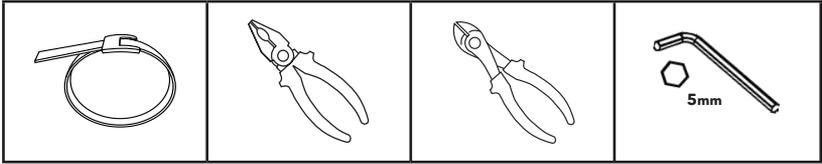

1

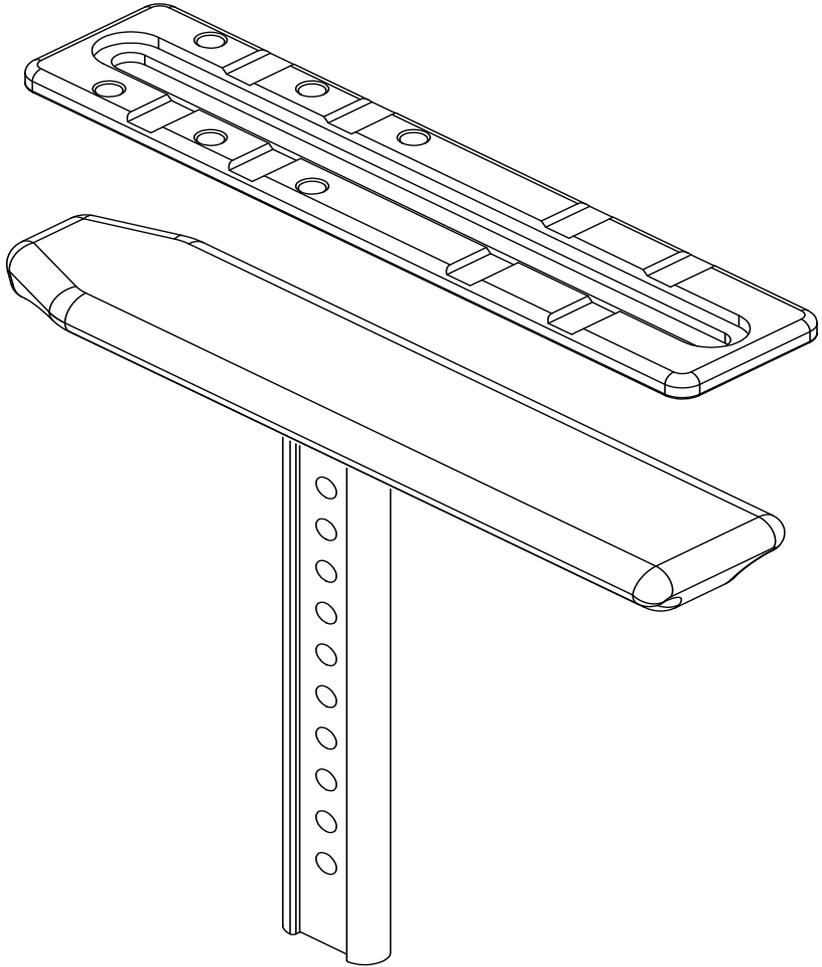

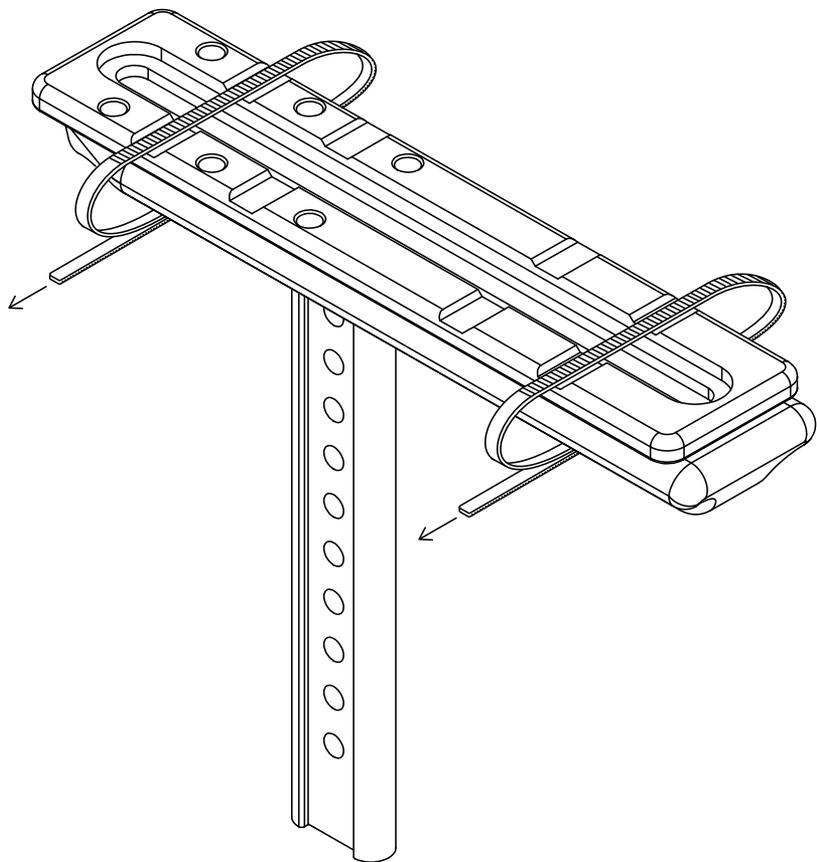

3

