

ASTRIDE Pro Max™

Bipedestador estático



⚠ ¡NOTA!

El fabricante es responsable del correcto funcionamiento del equipo sólo si se adquiere a un empleado cualificado de Akces-MED Sp. z o.o. o en una tienda médica especializada.

Akces-MED Sp. z o.o. se reserva el derecho a realizar cambios técnicos y comerciales en el contenido del manual sin previo aviso.




Producto sanitario de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios.

El fabricante ha emitido una declaración de conformidad adecuada para el producto.



Akces-MED Sp. z o.o. ha implantado un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 13485 para el diseño, la producción, la venta y el servicio.

El sistema está certificado por SGS.

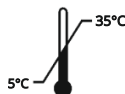

Índice

Introducción.....	4
1. Finalidad del manual de usuario.....	5
2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del producto.....	5
3. Características generales.....	7
4. Tabla de tallas.....	8
5. Cómo utilizar el bipedestador.....	9
5.1 Ajuste de la altura.....	11
5.2 Ajuste de los estabilizadores de pie.....	11
5.3 Ajuste de los soportes de rodilla.....	13
5.4 Ajuste del cinturón pélvico.....	15
5.5 Ajuste del cinturón pectoral - accesorios.....	17
6. Utilización del producto.....	19
6.1 Preparación del usuario.....	19
6.2 Preparación del producto.....	20
6.3 Verticalización.....	21
7. Normas de seguridad.....	22
8. Condiciones de garantía.....	24
9. Mantenimiento y limpieza.....	24
10. Etiquetado.....	28

Introducción

ASTRIDE Pro Max™ es un bipedestador estático moderno con función de abducción, caracterizado por un chasis metálico robusto, estable y duradero. Gracias a un innovador sistema de ajuste suave y continuo, es posible un posicionamiento preciso de las rodillas y el tronco del usuario. Este sistema único permite un control total de la postura corporal durante la bipedestación, garantizando seguridad y comodidad al mismo tiempo.

ASTRIDE Pro Max™ está equipado con cinturones torácicos y pélvicos fáciles de abrochar con ajuste independiente en todas las direcciones dentro de la zona pélvica y del tronco. Esta solución garantiza un control total sobre el posicionamiento de la cadera, lo que es importante especialmente en casos de defectos posturales. Además, los estabilizadores de pies ajustados individualmente con opción de abducción mediante innovadoras abrazaderas de ajuste, junto con los reposapiés contorneados con protecciones laterales, garantizan la comodidad y estabilidad de las extremidades inferiores.

Para eliminar la presión sobre la rótula y garantizar una posición correcta de las piernas durante la bipedestación, ASTRIDE Pro Max™ está equipado con soportes giratorios para las rodillas. Gracias a ellos, el proceso de bipedestación resulta cómodo y eficiente, especialmente beneficioso para personas con problemas posturales.

La robusta base de acero de ASTRIDE Pro Max™ está equipada con ruedas y frenos independientes, lo que facilita el desplazamiento del bipedestador entre habitaciones. El sistema de ajuste de altura suave y sin escalonamientos del bipedestador y la mesa, apoyado en un resorte de gas, hace que la terapia y las actividades diarias como aprender, jugar o comer sean aún más accesibles y cómodas.

No olvide leer atentamente este manual de usuario. No sólo encontrará información útil, sino también directrices relativas al uso seguro y eficaz del producto.

Si tiene alguna pregunta u observación, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Consultor médico: móvil +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, lea este manual del usuario que es esencial para el uso correcto y seguro del bipedestador.

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Garantiza la seguridad y prolonga la durabilidad, así como la estética del aparato.

1. Finalidad del manual de usuario

¡NOTA!

Este manual contiene la información básica necesaria para la correcta: preparación del bipedestador antes de su uso, utilización del bipedestador, cómo mantenerlo y limpiarlo.

El manual debe conservarse en un lugar de fácil acceso. Está destinado a las personas que atienden directamente a personas con discapacidad y a los médicos y fisioterapeutas que manejan el aparato.

Antes de utilizar el bipedestador ASTRIDE Pro Max™, el usuario (o cuidador) debe leer este manual y cumplir las disposiciones contenidas en él.

2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del producto

El dispositivo médico está destinado a personas con afecciones ortopédicas, neurológicas y cardiológicas, así como a las que tras una intervención quirúrgica, como consecuencia de una inmovilización prolongada, no pueden adoptar y mantener una posición erguida. El producto es una ayuda indispensable en el proceso de rehabilitación, tanto en el aspecto del movimiento como en el de la integración social. Es perfecto para la terapia, el juego y el aprendizaje. La selección del tamaño adecuado del producto depende de las indicaciones médicas y los parámetros anatómicos, independientemente de la edad del usuario.

El producto está recomendado para personas diagnosticadas de:

- Osteoartritis y motilidad articular.
- Daños mórbidos o vasculares en el cerebro y la médula espinal con paresia de los miembros inferiores, cuadriparesia, trastornos graves del equilibrio y la coordinación.
- Enfermedades desmielinizantes avanzadas (esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica).
- Hernia meningo-espinal.
- Enfermedades musculares - distrofias, miastenia gravis, polimiositis.
- Síndromes genéticos que cursan con paresia de las extremidades.
- Enfermedades degenerativas y metabólicas del sistema nervioso.
- Después de un traumatismo, tras un traumatismo craneoencefálico o lesiones medulares con lesión de la médula espinal con paresia y parálisis, especialmente con cuadriparesia (como paso en el proceso de rehabilitación o provisión ortopédica permanente).
- Parálisis cerebral: diversas formas.

2. Indicaciones y contraindicaciones para el uso del producto

Contraindicaciones:

La persona en posición vertical debe ser observada durante el periodo de posición vertical. Si se producen efectos secundarios, como desmayos, sudoración o desvanecimiento, tensión articular y las consiguientes deformidades corporales, debe interrumpirse la terapia. El tratamiento posterior debe consultarse con el médico especialista o el fisioterapeuta que haya prescrito la ayuda.

Una contraindicación absoluta para el enderezamiento es un estado crítico del usuario.

Contraindicaciones relativas a la posición vertical: hipertensión en reposo superior a 200/110 mmHg, hipertensión pulmonar, arritmias cardíacas, asma no estabilizada, trastornos metabólicos no estabilizados, estadio moderado de valvulopatía.

- Cualquier afección, como una fractura en proceso de consolidación u osteoporosis grave, que le impida soportar su propio peso corporal de cualquier forma.
- Fractura con fusión incompleta a menos que se haya obtenido autorización médica.
- Restricciones postoperatorias de la carga articular.
- Dolor asociado a la bipedestación (causado por subluxación o luxación de la cadera, estiramiento excesivo de los tejidos blandos, presión excesiva). La subluxación o luxación de cadera en ausencia de dolor no es una contraindicación.

Es posible que las personas con una flexión importante en las articulaciones de la cadera o la rodilla, o con contracturas en la articulación del tobillo, no puedan utilizar el bipedestador. Hay que tener cuidado de que la posición en el dispositivo no provoque una compresión o estiramiento excesivos de las zonas afectadas del cuerpo. En tales casos, la posición erguida puede estar contraindicada hasta que se consiga una mayor amplitud de movimiento en las articulaciones contracturadas.

Para las personas con sistemas cardiovasculares comprometidos (hipertensión en reposo superior a 200/110 mmHg, hipertensión pulmonar, arritmias cardíacas, estadio moderado de valvulopatía); sistema respiratorio (asma no estabilizada) y trastornos metabólicos no estabilizados, es necesario vigilar estrechamente al usuario mientras está de pie para evitar complicaciones graves. Esto incluye, en particular, el control de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y cualquier signo de hipertensión ortostática.

3. Características generales



CINTURÓN PECTORAL
CON FUNCIÓN DE ROTACIÓN DEL
PECHO

DISPONIBLE COMO ACCESORIO

4. Tabla de tallas



Símbolo	Medición	Unidad	Talla 1
	altura indicativa del usuario*	[cm]	130 - 160
A	altura del cinturón torácico (accesorios)	[cm]	92 - 125
B	anchura del cinturón pectoral (accesorios)	[cm]	20 - 45
	parámetro del cinturón pectoral (accesorios)	[cm]	70 - 130
C	altura del cinturón pélvico	[cm]	56 - 99
D	anchura del cinturón pélvico	[cm]	20 - 45
	parámetro del cinturón pélvico	[cm]	70 - 130
E	soportes de rodilla altura	[cm]	32 - 75
F	anchura soportes rodilla	[cm]	20 - 50
H	altura bandeja	[cm]	84 - 104
I	anchura del pie	[cm]	10 (talla M), 11 (talla L)**
J	distancia entre pies	[cm]	13 - 63
K	longitud del pie	[cm]	23 (talla M), 26 (talla L)**
	peso máx. usuario	[kg]	90

Símbolo	Peso y dimensiones	Unidad	Talla 1
X	anchura	[cm]	80
Y	longitud	[cm]	84
Z	altura	[cm]	106 - 138
Z ₁	altura de la bandeja	[cm]	99 - 119
	peso	[kg]	18
	peso con cinturón pectoral (accesorios)	[kg]	20

Nota: El margen de tolerancia de la medida es de +/- 1 cm.


* La altura no puede ser el parámetro principal a la hora de elegir el tamaño del producto.

** El bipedestador está equipado de serie con pies de la talla M. (Es posible cambiar a la talla L al realizar el pedido).


5. Cómo utilizar el bipedestador

AJUSTES



AJUSTE DE ALTURA

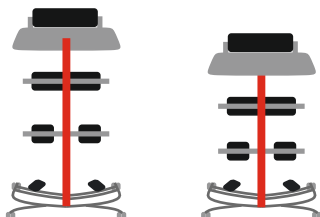

AJUSTE DE LOS ESTABILIZADORES DE PIE

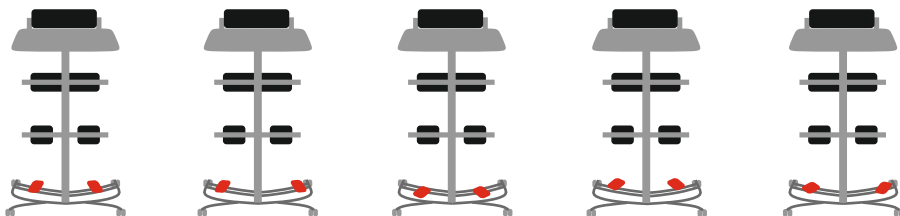

AJUSTE DE LOS SOPORTES DE RODILLA

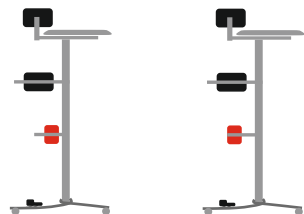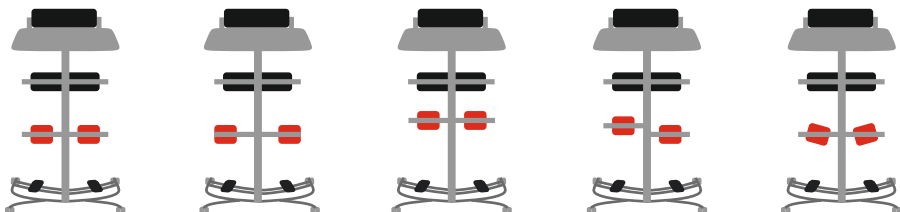


5. Cómo utilizar el bipedestador

AJUSTES

AJUSTE DEL CINTURÓN PÉLVICO



AJUSTE DEL CINTURÓN PECTORAL - ACCESORIOS

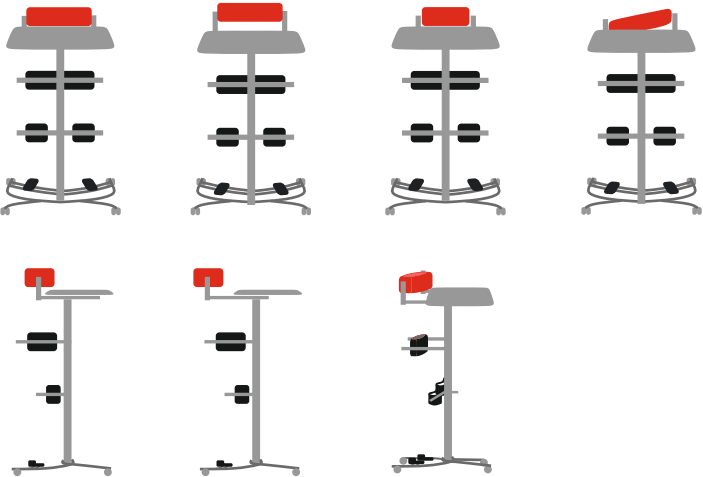

5. Cómo utilizar el bipedestador

5.1 Ajuste de la altura

¡INFORMACIÓN!

El bipedestador tiene protección contra el ajuste involuntario de la altura.

Para ajustar la altura, afloje dos pomos, ajuste la altura del bipedestador y bloquee los pomos.

Para bajar la altura, debe ejercer presión sobre la bandeja.



¡NOTA!

Compruebe si las palancas están bien bloqueadas antes de utilizarlas.

5.2 Ajuste de los estabilizadores de pie

¡INFORMACIÓN!

Para ajustar los estabilizadores de pie, afloje los pomos.

Los estabilizadores de pie se ajustan de forma independiente.



5. Cómo utilizar el bipedestador

5.2 Ajuste de los estabilizadores de pie



i ¡INFORMACIÓN!

Las barras de derotación son ajustables.

Desenrosque los tornillos, elija la ubicación adecuada de las barras en el bastidor y apriete los tornillos.

i ¡INFORMACIÓN!

A través de los orificios situados en los laterales de los pies, se puede ajustar el montaje de las correas en función de las necesidades del usuario. Utilizar correas adicionales y colocarlas en cruz proporcionará un mayor grado de estabilidad.

5. Cómo utilizar el bipedestador

5.2 Ajuste de los estabilizadores de pie



¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, asegúrese de que todos los pomos y tornillos estén bien apretados y de que las correas de velcro estén bien sujetas.

5.3 Ajuste de los soportes de rodilla

¡INFORMACIÓN!

Utilice los mandos para realizar un ajuste.



5. Cómo utilizar el bipedestador

5.3 Ajuste de los soportes de rodilla

AJUSTE DE PROFUNDIDAD




AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE ANCHURA



AJUSTE DE ANCHURA

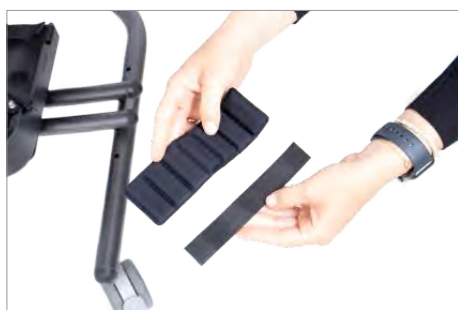

5. Cómo utilizar el bipedestador

5.3 Ajuste de los soportes de rodilla

i ¡INFORMACIÓN!

Los elementos blandos de las correas de sujeción de la rodilla pueden acortarse con unas tijeras, guiando el corte a través del hueco seleccionado.

Además, ajuste la longitud del elemento de velcro cortándolo en relación con la longitud del elemento blando.




A ¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, asegúrese de que todos los pomos están bien apretados y de que las correas de velcro están bien sujetas.

5.4 Ajuste del cinturón pélvico

AJUSTE DE ALTURA

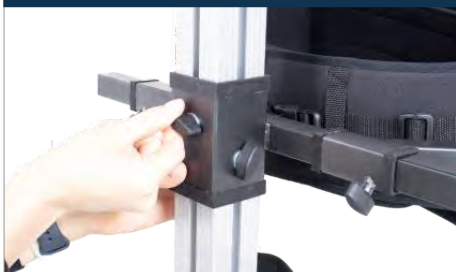

AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



5. Cómo utilizar el bipedestador

5.4 Ajuste del cinturón pélvico

AJUSTE DE ANCHURA



AJUSTE DE ANCHURA



¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, asegúrese de que todos los pomos estén bien apretados y de que las correas de velcro estén bien sujetas.

Asegúrese también de que los botones de presión que fijan las correas al bipedestador están bien apretados.



5. Cómo utilizar el bipedestador

5.5 Ajuste del cinturón pectoral - accesorios

AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE ANCHURA



AJUSTE DE ANCHURA



5. Cómo utilizar el bipedestador

5.5 Ajuste del cinturón pectoral - accesorios



¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, asegúrese de que todos los pomos estén bien apretados y de que las correas de velcro estén bien sujetas.

Asegúrese también de que los botones de presión que fijan las correas al bipedestador están bien apretados.

6. Utilización del producto

¡NOTA!

Antes de utilizar el ASTRIDE Pro Max™ vertical, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.

El usuario y el aparato deben estar preparados antes de cada uso.

6.1 Preparación del usuario

Antes de utilizar el bipedestador, debe prestarse atención a:

- el atuendo del usuario era ligero y no limita los movimientos,
- el calzado es cómodo, con una buena estabilización del tobillo,
- el usuario no se coloca en el bipedestador sin ropa que cubra el cuerpo en los puntos de contacto con la tapicería, por razones de higiene y para evitar abrasiones,
- si se utilizan medios auxiliares adicionales, como drenajes, bolsas, catéteres, etc., éstos se sujetan adecuadamente para evitar que se caigan, se desprendan o se pincen, de modo que no interfieran con el uso del dispositivo,
- colocar dispositivos ortopédicos (collarín cervical, corsé, ortesis, calzado ortopédico, etc.) cuando esté indicado.

¡NOTA!

La prenda debe proteger la piel del usuario del contacto directo con la tapicería y otras partes del equipo.

La decisión de utilizar dispositivos ortopédicos específicos corresponde al médico o al fisioterapeuta.

6. Utilización del producto

6.2 Preparación del producto

1. Para proceder a su correcta utilización, debe:

- montar el bipedestador,
- colocar sobre una superficie plana, sin pendiente, que permita un fácil acceso al bipedestador, lejos de fuentes de fuego y calor,
- asegúrese de que todas las piezas del bipedestador funcionan correctamente, están bien fijadas y son estables,
- activar los frenos,
- ajustar el bipedestador al tamaño y las necesidades del usuario,
- coloque al usuario en posición vertical,
- fijar los componentes utilizados para estabilizar al usuario: correas de estabilización de los pies, rodilleras, ortesis de cadera y torácicas (si existen),
- empezar a enderezar.

¡NOTA!

Antes de utilizar el bipedestador, asegúrese de que todas las correas y sujeciones estén correctamente ajustadas y abrochadas, y de que los cierres de los componentes ajustables estén bien apretados.

Un bipedestador sólo cumplirá correctamente su función si se ajusta a las dimensiones y necesidades del usuario. El principio fundamental a la hora de ajustar el bipedestador es garantizar que el usuario se sienta lo más seguro posible. La posición del cuerpo del usuario no debe forzarse a cambiar, ya que esto puede causar incomodidad. El uso incorrecto del bipedestador puede perpetuar patrones posturales incorrectos.

El ajuste inicial del bipedestador al usuario sólo debe realizarlo personal debidamente formado. El ajuste correcto del dispositivo es esencial para la seguridad y determina el curso correcto de la rehabilitación del usuario.

6. Utilización del producto

6.3 Verticalización

La duración de la bipedestación es individual para cada usuario. En el periodo inicial de bipedestación se recomienda aumentar gradualmente este tiempo (periodo de adaptación del cuerpo al cambio de posición). La decisión sobre la duración de la bipedestación corresponde al médico o al fisioterapeuta. La bipedestación del usuario debe realizarse bajo la supervisión de personal cualificado.

Es aconsejable distraer al usuario durante el enderezamiento mediante juegos manipulativos, juegos educativos, estimulación táctil y otros.

¡NOTA!

Antes de cada uso, el bipedestador debe ajustarse al usuario.

Asegúrese de que todas las correas y sujeciones están correctamente ajustadas y sujetas y de que las fijaciones de los componentes ajustables están bien apretadas antes de proceder al enderezamiento.

Está prohibido dejar al usuario en el producto sin vigilancia y sin supervisión de un supervisor.

El ajuste inicial del bipedestador al usuario sólo debe realizarlo personal debidamente formado.

La primera bipedestación de un paciente suele tener lugar en un servicio de rehabilitación, neurología, neurocirugía u ortopedia. La bipedestación lo realiza un médico junto con un fisioterapeuta debido a los problemas médicos que pueden surgir durante los primeros procedimientos: desmayos, desvanecimientos, bajadas de tensión, mareos y otros. La bipedestación se continúa en casa por personal cualificado tras la formación (técnico de rehabilitación, enfermera comunitaria, familiares formados).

7. Normas de seguridad

¡NOTA!

Utilice el bipedestador ASTRIDE Pro Max™ de acuerdo con las instrucciones de este manual. El usuario y el aparato deben estar preparados antes de cada uso.

Antes de decidirse a comprar un bipedestador ASTRIDE Pro Max™, consulte a un médico especialista o a un fisioterapeuta sobre la elección correcta del bipedestador. Antes de utilizar el bipedestador, lea todas las instrucciones del manual adjunto.

1. Antes de utilizar el bipedestador cada vez:
 - compruebe si el bipedestador presenta daños visibles u otros defectos que puedan poner en peligro al usuario durante el uso del bipedestador,
 - asegúrese de que todas las piezas estén correctamente montadas y de que el armazón de pie no presente signos de grietas o deformaciones,
 - compruebe si los pernos, tuercas y otras conexiones roscadas, pegadas, cosidas, etc. están flojos,
 - compruebe el estado de la tapicería para ver si presenta daños,
 - comprobar la eficacia de los frenos,
 - comprobar el correcto funcionamiento de las hebillas,
 - utilice siempre cinturones de seguridad; las correas de velcro de estos cinturones deben superponerse al menos 8cm,
 - ajustar el bipedestador al tamaño y las necesidades del usuario ajustando en consecuencia las abrazaderas, las rodilleras y los pies,
 - asegúrese de que las piezas móviles y los mandos de ajuste del bipedestador estén bien apretados y bloqueados,
 - asegurar al usuario con el equipo estabilizador disponible en el bipedestador, como correas estabilizadoras para los pies. El objetivo es proteger al usuario, entre otras cosas, de caídas o deslizamientos.
2. Está prohibido utilizar el bipedestador de una manera para la que no está destinado.
3. Está prohibido utilizar el bipedestador si está dañado o si falta alguna pieza.
4. Está prohibido dejar al usuario en posición vertical sin el cuidado y la supervisión de un adulto.
5. No utilice el producto a menos que haya un cuidador cerca que haya leído las instrucciones de uso.
6. Está prohibido dejar el bipedestador con el usuario desatendido en terrenos inclinados o accidentados.
7. Está prohibido subir/bajar escaleras con o sin el usuario.
8. La inserción o extracción del usuario del bipedestador debe hacerse siempre con el freno activado.
9. Debe tenerse cuidado de que las extremidades del usuario no se introduzcan entre las partes ajustables del dispositivo cuando se utilice el bipedestador.
10. El bipedestador debe almacenarse y utilizarse lejos de fuentes de fuego o altas temperaturas. Tampoco debe almacenarse ni utilizarse en habitaciones con mucha humedad.

7. Normas de seguridad

11. Al transportar el bipedestador sin el usuario, debe protegerse bien contra posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por una protección inadecuada del bipedestador durante el transporte.
12. Retire todos los envases de papel y plástico antes de utilizar el bipedestador. El embalaje no es un juguete. Manténgalo alejado de niños y animales.

¡NOTA!

Una configuración incorrecta del dispositivo puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformidades corporales, distensiones articulares, etc. En caso de que se produzcan, interrumpa inmediatamente el enderezamiento, retire al usuario del dispositivo y acuéstese. Si los síntomas no deseados persisten, póngase en contacto con un médico inmediatamente. Si los síntomas han remitido, informe al médico que le atiende para que decida el curso ulterior del proceso de enderezamiento.

Un incidente grave relacionado con un producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario.

El producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de ingestión para el usuario.

No utilice un producto que presente signos de daño, deterioro o desgaste. Sólo un producto en perfecto estado de funcionamiento, utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso, es seguro para el usuario. Si un producto está dañado, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el fabricante.

No intente reparar el producto usted mismo ni realizar cambios en su diseño, ya que esto pone en riesgo al usuario y anula la garantía del producto.

No supere el peso máximo admisible del usuario indicado en la placa de características y en la tabla de tallas de la página 8 del manual.

8. Condiciones de garantía

- Akces-MED. Sp. z o.o. vende productos técnicamente eficaces y sin defectos de diseño, montaje, materiales, etc.
- El bipedestador estático ASTRIDE Pro Max™ tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo por parte del usuario. Durante este periodo, el fabricante garantiza la reparación mediante un servicio gratuito, de acuerdo con la tarjeta de garantía.
- Los daños que se produzcan después de 24 meses pueden repararse a cargo del usuario, a menos que el bipedestador sea objeto de reembolso. En este caso, el usuario puede solicitar al Servicio Nacional de Salud el reembolso de la reparación del bipedestador en el marco del servicio posgarantía.
- El fabricante especifica una vida útil de 48 meses para el bipedestador. Transcurrido este periodo, el usuario sólo puede utilizar el equipo si lo devuelve al fabricante para una inspección. Tras la inspección, el fabricante redefinirá la vida útil del bipedestador y la fecha de la próxima inspección.
- En caso de daños en el bipedestador, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto o con el Servicio de Atención al Cliente de Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 77).

9. Mantenimiento y limpieza

El ASTRIDE Pro Max™ vertical, al ser un dispositivo médico, debe mantenerse razonablemente limpio y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El aparato debe almacenarse en un lugar limpio, seco y ventilado. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza y el mantenimiento cíclicos del bipedestador son esenciales para mantener su correcto funcionamiento y seguridad.

Recomendaciones para la limpieza de la tapicería y los componentes del bipedestador:

1. Lávelo con agua tibia utilizando un paño suave empapado en un producto de limpieza suave de uso general.
2. Utilizar un paño demasiado húmedo puede aumentar las manchas y dañar la tapicería o la espuma de su interior.
3. Después de limpiar las manchas, hay que pasar un paño limpio y húmedo por la tapicería y secarla.
4. No permita que la tapicería se moje durante la limpieza.
5. La tapicería no debe mojarse.
6. No olvide eliminar el exceso de humedad de la tapicería antes de repetir la limpieza.
7. No se recomienda utilizar cepillos duros.
8. No limpie la tapicería con productos químicos fuertes, como disolventes o agentes cáusticos a base de cloro.

9. Mantenimiento y limpieza

9. No está permitido limpiar, reemplazar piezas o mantener el soporte mientras esté en uso por el usuario.
10. Los elementos metálicos y plásticos se deben limpiar manualmente utilizando productos de limpieza para plásticos generalmente disponibles, después de leer las instrucciones del fabricante para un producto de limpieza determinado.
11. Es posible desinfectar los elementos metálicos, plásticos, de madera y tapizados del producto utilizando un líquido desinfectante generalmente disponible. Para desinfectar un elemento seleccionado, rocíe su superficie con un líquido desinfectante generalmente disponible en el mercado y límpielo con un paño limpio y seco. Después de la desinfección esperar hasta que el elemento esté completamente seco, especialmente en el caso de tapizados. Al elegir un desinfectante a base de alcohol, primero compruebe en un lugar discreto si el preparado no decolorará ni dañará la superficie a desinfectar.

¡NOTA!

¡Antes de volver a utilizar el soporte, el tapizado siempre debe estar seco!

¡En caso de daños causados por el uso de productos de limpieza inadecuados, el fabricante Akces-MED Sp. z o. zoo. no es responsable!

Antes de comenzar a usar:

- limpiar las ruedas de cualquier suciedad,
- comprobar si las ruedas están correctamente apretadas y sin daños, y si los frenos bloquean las ruedas en rotación,
- comprobar si la estructura del soporte no presenta signos de grietas u otras deformaciones,
- comprobar que todas las piezas móviles se mueven completamente y que todos los tornillos, tuercas, perillas, etc. están completos y bien apretados,
- compruebe que las correas no estén deshilachadas y que todos los sujetadores funcionen

¡NOTA!

El fabricante sólo es responsable de los defectos ocultos o daños técnicos resultantes del uso adecuado del producto. Sólo si se siguen estrictamente estas recomendaciones, el fabricante será responsable del correcto funcionamiento del bipedestador. En caso de cualquier daño, comuníquese con el vendedor autorizado al que compró el producto o con el Departamento de Atención al Cliente de Akces-MED Sp. z o. zoo. (tel. +48 17 864 04 73).



9. Mantenimiento y limpieza

REVISIÓN TÉCNICA

Las inspecciones técnicas deben realizarse periódicamente. Antes de realizar el mantenimiento, limpie el producto a fondo para revelar cualquier daño oculto.

Frecuencia	¿Qué se debe comprobar?	Actividades	Comentarios
Antes de cada uso.	Estado general del producto.	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • todo el producto para detectar daños visibles, grietas o defectos mecánicos, • si el producto está completo, • que todos los pernos, tornillos, pomos, tuercas y demás componentes estructurales del producto estén completos y apretados. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Ruedas y frenos.	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • levantando la base, compruebe que las ruedas están bien sujetas y no están dañadas, • si el freno activo bloquea la rueda en rotación, • que las ruedas no estén sucias. Limpie las ruedas de cualquier suciedad. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Fijación de elementos estructurales.	<p>Inspeccionar todos los mecanismos del carro y sus partes móviles, en particular comprobar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corrección del montaje del asiento (si procede), • correcto montaje de las ruedas (si procede), • la corrección de la instalación y el funcionamiento de los componentes de protección del usuario (si procede), • que todas las piezas móviles estén completas, se muevan completamente y no se atasquen, • corrección de los mecanismos de ajuste (si procede) de los componentes, es decir: reposacabezas, respaldo, asiento, cuña intermedia, reposabrazos, reposapiés. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
	Elementos de tapicería.	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • componentes de la tapicería para detectar cualquier daño, desgarró, grieta, costuras sueltas, deformación, • que las correas estabilizadoras, los chalecos y los cinturones de seguridad del usuario no estén deshilachados ni retorcidos, y que las hebillas y los cierres funcionen correctamente, • que las correas estabilizadoras del usuario, los cinturones de seguridad del chaleco estén correctamente ajustados y no se desabrochen bajo presión/tiro. 	Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.
Una vez a la semana.	Limpieza del producto.	Limpie la estructura y el tapizado del producto de la suciedad resultante del uso diario (polvo, barro u otros) con un paño húmedo y un producto de limpieza suave de uso general. Elimine la suciedad (por ejemplo, pelos, restos de comida, etc.) de las partes móviles del producto.	Limpie el producto siempre que sea necesario, pero al menos una vez a la semana. No utilice limpiadores a base de cloro ni alcoholes metilados. La tapicería debe estar seca antes de utilizar el producto.

9. Mantenimiento y limpieza

REVISIÓN TÉCNICA

Las inspecciones técnicas deben realizarse periódicamente. Antes de realizar el mantenimiento, limpie el producto a fondo para revelar cualquier daño oculto.

Frecuencia	¿Qué se debe comprobar?	Actividades	Comentarios
Una vez al mes.	Ejes de ruedas, acoplamientos rápidos (si procede).	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> que las ruedas giren libremente sobre los ejes y que éstos no tengan holgura. El mantenimiento consiste en aplicar una pequeña cantidad de mantenimiento y lubricante entre el eje y el cubo de la rueda. Compruebe el montaje y desmontaje de la rueda. 	<p>Si encuentra suciedad, limpie las ruedas de restos de comida, polvo, pelos u otros residuos.</p> <p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Juntas de construcción del producto (soldadas, roscadas, soldadas).	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> el estado del armazón del producto en las uniones (soldaduras, roscas, soldaduras). 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Neumáticos, cámaras de aire (si procede).	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> estado de desgaste de la banda de rodadura. Compruebe si hay daños visibles. Compruebe el nivel de presión de las ruedas (si procede). 	<p>Si la presión de las ruedas es demasiado baja, infle las ruedas hasta el nivel correcto.</p> <p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
Una vez cada 6 meses.	Elementos de diseño móviles.	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> las partes móviles de la estructura para detectar cualquier daño y realizar su mantenimiento con un agente especializado. 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>
	Etiquetado del producto.	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> la legibilidad de las marcas y la etiqueta del producto. 	<p>Si se detecta algún daño o deficiencia, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el Vendedor/Distribuidor al que compró el producto o con el Fabricante.</p>

Al final de la vida útil del producto.	Descripción detallada del producto.	Resumen del producto.	<p>El fabricante especifica la vida útil del producto, que figura en las instrucciones de uso. Transcurrido este periodo, el usuario sólo podrá utilizar el producto si lo devuelve al fabricante para su inspección. Tras la inspección, el fabricante volverá a especificar la vida útil del producto y la fecha de la próxima inspección.</p> <p>Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el vendedor/distribuidor al que compró el producto o con el fabricante.</p>
--	-------------------------------------	-----------------------	---

10. Etiquetado

CE Certificado de conformidad del producto con los requisitos esenciales de la normativa de la UE

REF Número de catálogo

SN Número de serie

Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo

¡Nota!

Fabricante

Fecha de producción

Sin látex

Almacenar en un lugar seco

Prohibición de utilizar el producto sin abrocharse los cinturones de seguridad

Proteger de la luz solar

Limitación de la temperatura de almacenamiento

Humedad relativa de almacenamiento

No secar en secadora

Secado vertical

No clorar

No planchar

No limpiar en seco

No blanquear

Contenido cuidado y delicado

Prohibición de bajar escaleras, tanto con y sin

Prohibición de dejar al usuario desatendido mientras se utiliza el producto

Lea la siguiente información adicional

Pulse el botón que aparece en la imagen

Para el montaje es necesario utilizar las herramientas indicadas en la descripción

MD Productos sanitarios

Ejemplo de placa de características

	NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO ES	
CÓDIGO QR UNA VEZ ESCANEADO, LE DIRIGE A LA PÁGINA WEB DE PRODUCTOR			CÓDIGO BAR
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE			FIRMA VER TAMBIÉN
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE CARGA DEL PRODUCTO	FECHA DE PRODUCCIÓN		
NÚMERO DE SERIE EN FORMA DE CÓDIGO DE BARRAS			NÚMERO DE SERIE

PRODUTOR



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619

Representante Autorizado